

OHHMED

Guide de démarrage rapide

vertica

Modèle de produit : OH_Prod0001



ATTENTION ! Veuillez à lire le *mode d'emploi* avant d'utiliser ce produit. Il contient des informations importantes relatives à la sécurité. La lecture de ce guide de démarrage rapide seul n'est pas suffisante.



ATTENTION ! Le dispositif Vertica® est conçu pour un traitement médical personnel et intime à domicile. Le dispositif a quitté notre usine propre et prêt à l'emploi. Le dispositif sera considéré comme « utilisé » dès que vous retirez ou endommagez le sceau présent sur le dispositif.

Ceci est une traduction en français du mode d'emploi original en anglais

Février 2024 | OH_Misc0021_RevD

CONTENU

1	Remarques importantes	3
2	Contre-indications	3
3	Description de l'utilisateur	4
4	Éléments du produit	4
4.1	Le dispositif et le patch Vertica	4
4.2	Le panneau de commande	5
5	Consignes de sécurité	6
6	Fonctionnement de base du dispositif Vertica	6
6.1	Allumer/éteindre le dispositif	6
6.2	Régler le niveau d'énergie	6
6.3	Verrouiller le bouton énergie	7
6.3.1	Activer le mode traitement en appuyant sur le bouton énergie	8
7	Commençons le traitement !	9
7.1	Préparation	10
7.2	Traitement	10
7.2.1	Première partie du traitement (mode ANNEAU)	11
7.2.2	Deuxième partie du traitement (mode ANNEAU+PATCH)	16
8	Nettoyage du dispositif Vertica	20

1 REMARQUES IMPORTANTES

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau dispositif Vertica®. Veuillez respecter les consignes suivantes pour votre sécurité et l'efficacité des traitements :

- Avant d'utiliser le dispositif Vertica, veuillez lire attentivement l'intégralité du *mode d'emploi* et vous assurer de bien le comprendre. Conservez le *mode d'emploi* et le *guide de démarrage rapide* pour vous y référer ultérieurement.
- Prêtez une attention particulière aux instructions, aux avertissements, aux mises en garde et aux consignes de sécurité.

2 CONTRE-INDICATIONS



Veuillez consulter votre médecin si vous avez des doutes concernant des médicaments ou des problèmes de santé non mentionnés.

N'utilisez pas le dispositif Vertica si vous êtes concerné par l'une des situations suivantes :


- Vous portez un stimulateur cardiaque ou souffrez de toute autre forme d'affection cardiaque, p. ex. arythmie ;
- Vous avez un dispositif métallique implanté quelconque, y compris des piercings corporels situés autour de la zone de traitement ;
- Vous avez des lésions cutanées sur la zone à traiter, par exemple des plaies ;
- Vous souffrez d'un trouble de la coagulation sanguine ;
- Vous prenez des médicaments antiplaquettaires ;
- Vous prenez ou avez pris de l'isotrétinoïne (Accutane) au cours des 12 derniers mois ;
- Vous portez un neurostimulateur.

3 DESCRIPTION DE L'UTILISATEUR

- Ce document est destiné à l'utilisateur privé du dispositif Vertica.
- Le dispositif Vertica est destiné aux adultes uniquement.


4 ÉLÉMENTS DU PRODUIT

4.1 LE DISPOSITIF ET LE PATCH VERTICA

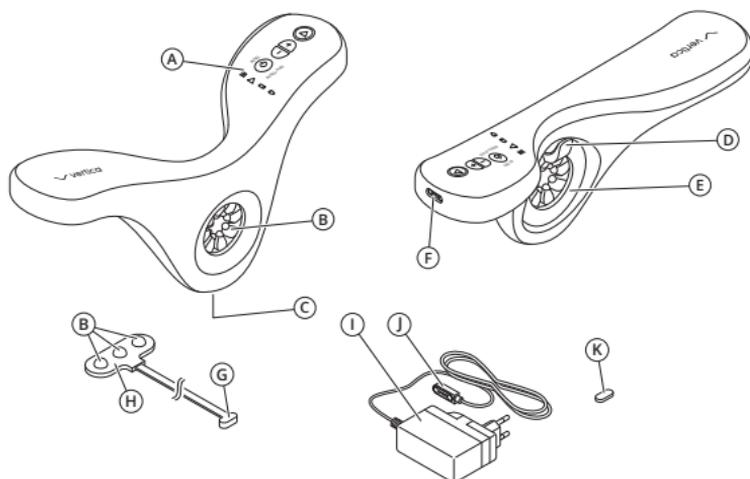

ID	Nom	ID	Nom
A	Panneau de commande	G	Fiche du patch (magnétique)
B	Électrodes RF (dômes métalliques)	H	Patch
C	Port pour le branchement du patch (magnétique)	I	Chargeur
D	Poignée de l'anneau	J	Fiche du chargeur (magnétique)
E	Anneau	K	Capuchon du port de chargement
F	Port de chargement (magnétique)		

4.2 LE PANNEAU DE COMMANDE

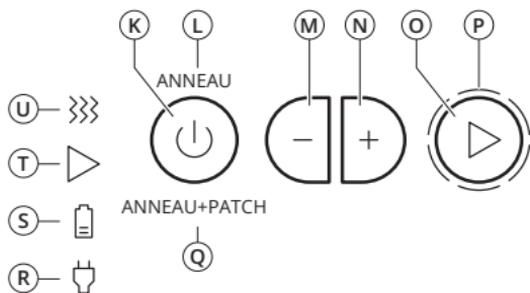

ID	Fonction	
L	Bouton d'alimentation/ mode	Pour activer ou désactiver le dispositif et sélectionner le mode ANNEAU ou ANNEAU + PATCH
M	Indicateur du mode ANNEAU	Pour indiquer que le mode ANNEAU est sélectionné
N	Bouton d'ajustement du niveau d'énergie (-)	Pour diminuer le niveau d'énergie
O	Bouton d'ajustement du niveau d'énergie (+)	Pour augmenter le niveau d'énergie
P	Bouton énergie	Pour activer et désactiver le mode traitement
Q	Indicateur du niveau d'énergie	Pour indiquer le niveau d'énergie réglé à l'aide des boutons de réglage du niveau d'énergie (+/-)
R	Indicateur du mode ANNEAU+PATCH	Pour indiquer que le mode ANNEAU+PATCH est sélectionné
S	Indicateur de câble de chargement	Pour indiquer que le câble d'alimentation est connecté au port d'alimentation et que le chargeur est connecté à la prise de courant.
T	Indicateur de batterie	Pour indiquer l'état de la batterie et pour indiquer que le dispositif est en cours de chargement.
U	Indicateur du mode traitement	Pour indiquer que le mode traitement est actif
V	Indicateur d'énergie RF	Pour indiquer la diffusion d'énergie RF

5 CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT ! Lisez et comprenez le *mode d'emploi* et ses consignes de sécurité avant d'utiliser ce dispositif. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures physiques, des dommages matériels ou une dégradation de l'environnement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages résultant du non-respect des consignes de sécurité.

6 FONCTIONNEMENT DE BASE DU DISPOSITIF VERTICA

6.1 ALLUMER/ÉTEINDRE LE DISPOSITIF

Pour allumer le dispositif :

- Appuyez sur le **bouton alimentation/ mode traitement**. L'indicateur du mode ANNEAU et l'indicateur du niveau d'énergie s'allument. Le dispositif est allumé et en mode veille.

Pour éteindre le dispositif :

- Maintenez le **bouton alimentation/ mode traitement** enfoncé pendant 3 secondes. Le dispositif vibre pendant un court instant et tous les voyants lumineux s'éteignent. Le dispositif est éteint.

6.2 RÉGLER LE NIVEAU D'ÉNERGIE



Chaque fois que vous allumez le dispositif, le niveau d'énergie est automatiquement réglé sur le niveau un.

Pour régler le niveau d'énergie :

1. Appuyez sur le **bouton d'ajustement du niveau d'énergie (-)** pour diminuer le niveau d'énergie.
2. Appuyez sur le **bouton d'ajustement du niveau d'énergie (+)** pour augmenter le niveau d'énergie.

L'indicateur de niveau d'énergie affiche les conditions suivantes, en fonction du niveau d'énergie défini :

Indicateur du niveau d'énergie						
Niveau d'énergie	1 (minimum)	2	3	4	5	6 (maximum)

6.3 VERROUILLER LE BOUTON ÉNERGIE



AVERTISSEMENT !

Activer le mode traitement ne fait que *préparer* le dispositif pour le traitement.

Le traitement effectif par énergie RF est indiqué par l'**indicateur d'énergie RF** !

Ce qui se passe en mode traitement :

1. Le dispositif vérifie automatiquement qu'il est bien contact avec le pénis.
2. Ce n'est que lorsqu'un contact avec le pénis est détecté que l'**indicateur d'énergie RF** s'allume et que l'énergie RF est délivrée (traitement du tissu érectile).



REMARQUE Le traitement n'est en cours que lorsque l'indicateur d'énergie RF est allumé. Lorsque l'indicateur d'énergie RF est éteint, il n'y a pas de traitement en cours.

Le mode traitement peut être activé de deux manières :

- Maintenez le bouton énergie enfoncé.
- Verrouillez le mode traitement (voir le *mode d'emploi – Activer et verrouiller le mode traitement*).

6.3.1 ACTIVER LE MODE TRAITEMENT EN APPUYANT SUR LE BOUTON ÉNERGIE

Pour activer le mode traitement :

1. Vérifiez que le dispositif est allumé.
2. Maintenez le **bouton énergie** enfoncé.

L'indicateur de traitement clignote, l'indicateur de niveau d'énergie clignote et l'indicateur de mode traitement est allumé.

Pour désactiver le mode traitement :

- Relâchez le **bouton énergie**.

Le voyant du mode traitement est éteint et le dispositif est en mode veille.

7 COMMENÇONS LE TRAITEMENT !

AVERTISSEMENT !

- Assurez-vous d'avoir lu les consignes de sécurité.
- Assurez-vous que le dispositif Vertica est complètement chargé. Veuillez consulter la section *Chargement du dispositif Vertica* pour en savoir plus.
- Vous ne devez jamais être debout lorsque vous effectuez le traitement. Veillez à vous asseoir confortablement pour effectuer le traitement.
- Lorsque le traitement est activé :
 - déplacez toujours le dispositif vers le gland (le gland du pénis) et non vers le corps.
 - toutes les électrodes RF doivent être en contact permanent avec la peau.
- Assurez-vous que le câble de chargement n'est pas branché au dispositif Vertica.
- Veillez toujours à ce qu'il y ait suffisamment de gel sur le pénis pendant le traitement et ajoutez du gel si nécessaire.
- Si vous sentez une sensation de chaleur sur la peau pendant le traitement, cela peut indiquer un manque de gel.
- Réduisez le niveau d'énergie à l'aide de la touche d'ajustement du niveau d'énergie (-) si la sensation de chaleur est inconfortable.
- Si vous ne ressentez aucune sensation de chaleur pendant le traitement, consultez la section *Dépannage* pour plus d'informations.



7.1 PRÉPARATION

Il est recommandé de

- vous asseoir confortablement, par exemple sur une chaise ou sur le bord d'un lit ;
- vous assurer que vous avez suffisamment de gel pour le traitement complet ;
- vous assurer d'avoir une serviette à disposition pour vous essuyer les mains après l'application du gel ;
- raser la zone du périnée (zone située entre l'anus et le scrotum) avant d'appliquer le **patch**.

7.2 TRAITEMENT

Le traitement complet avec le dispositif Vertica est divisé en deux parties :

- Traitement de 15 minutes par diffusion d'énergie RF au niveau du pénis en mode ANNEAU ;
- Traitement de 15 minutes par diffusion d'énergie RF au niveau du pénis et de la zone du périnée en mode ANNEAU + PATCH.

- **Diffusion d'énergie RF pendant 15 minutes**



Pendant le traitement, le dispositif Vertica vérifie la durée de chaque diffusion d'énergie RF (le temps pendant lequel l'indicateur d'énergie RF est allumé). Le dispositif Vertica vibre lorsque la durée atteint 15 minutes pour indiquer la fin du traitement.

- **Programme de traitement recommandé**


Pendant le premier mois de traitement, effectuez le traitement complet trois fois par semaine. Pendant le deuxième mois de traitement, effectuez le traitement complet au moins deux fois par semaine. À partir du troisième mois, effectuez le traitement complet au moins une fois par semaine.

7.2.1 PREMIÈRE PARTIE DU TRAITEMENT (MODE ANNEAU)

1. Appliquez une couche de gel (gel conducteur d'ultrasons ou de RF) de trois à cinq millimètres d'épaisseur sur le pénis. Veillez à couvrir toute la surface du pénis.




Pour garantir un traitement optimal, les dômes des électrodes RF de l'anneau doivent être recouverts de gel. Ajoutez du gel pendant le traitement si nécessaire.

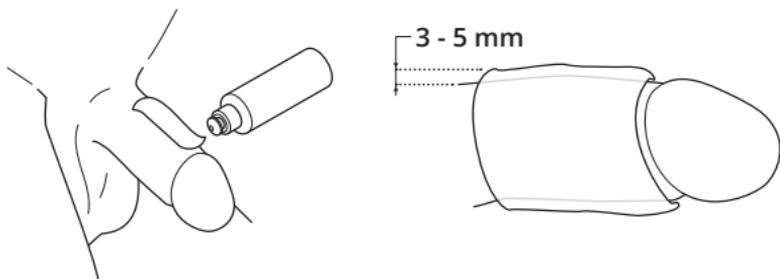

2. Appuyez sur le **bouton d'alimentation/ mode traitement** pour allumer le dispositif.

Le dispositif est en mode veille. L'indicateur du mode ANNEAU s'allume et l'indicateur du niveau d'énergie affiche le niveau d'énergie un.


3. Veillez à tenir le dispositif Vertica de manière à ce que le panneau de commande se trouve sur le côté droit.

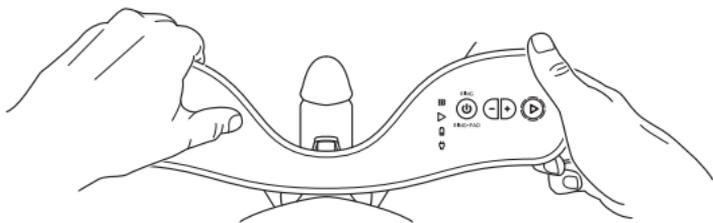

4. Poussez la **poignée de l'anneau** vers la gauche pour ouvrir l'**anneau** et insérez le pénis dans l'**anneau**. Remontez le dispositif Vertica le plus près possible de votre corps.



Le dispositif doit entrer en contact avec la zone pelvienne.

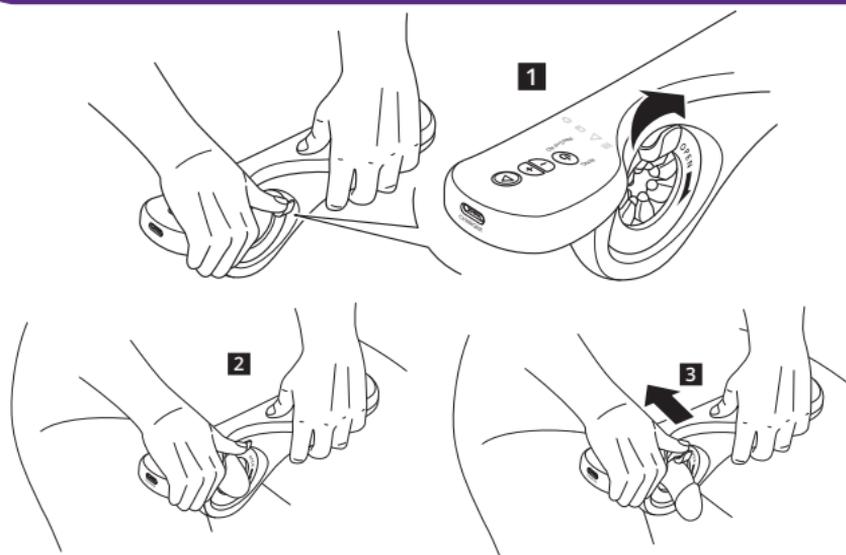

5. Relâchez doucement la **poignée de l'anneau** pour permettre aux électrodes RF de l'**anneau** d'entrer en contact avec le pénis sans être trop serrées.



6. Sélectionnez le niveau d'énergie souhaité à l'aide des **boutons d'ajustement du niveau d'énergie (+/-)**.

L'indicateur de niveau d'énergie indique le niveau d'énergie choisi.




Il est recommandé de commencer chaque traitement au niveau 1 pendant au moins 1 minute et d'augmenter en fonction de la sensation de chaleur que vous souhaitez. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau d'énergie pendant le traitement. Choisissez le niveau d'énergie qui vous semble confortable pendant le traitement. Arrêtez le traitement si vous ressentez une douleur pendant la séance.

7. Maintenez le **bouton énergie** enfoncé pour activer le mode traitement. L'indicateur du mode traitement clignote. L'indicateur d'énergie RF s'allume et le dispositif diffuse de l'énergie RF.




Si les électrodes RF ne sont pas en contact avec le pénis, le traitement ne peut pas démarrer. Si l'indicateur d'énergie RF ne s'allume pas, consultez à la section *Dépannage du mode d'emploi* pour plus d'informations.

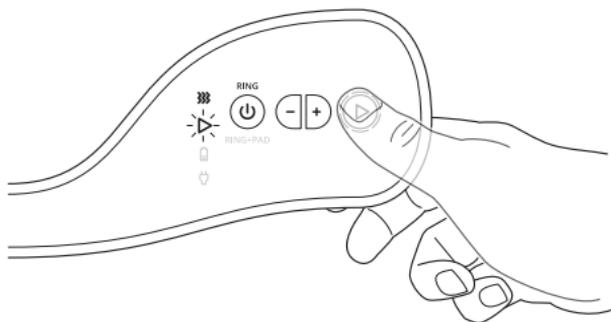

- Attendez 30 secondes ou attendez 3 secondes après l'extinction de l'**indicateur d'énergie RF** avant de déplacer le dispositif d'environ un centimètre vers le gland (tête du pénis).




Déplacez toujours le dispositif vers le gland (la tête du pénis) et non vers le corps. Vous pouvez sélectionner le niveau d'énergie souhaité à l'aide des **boutons d'ajustement du niveau d'énergie (+/-)**.

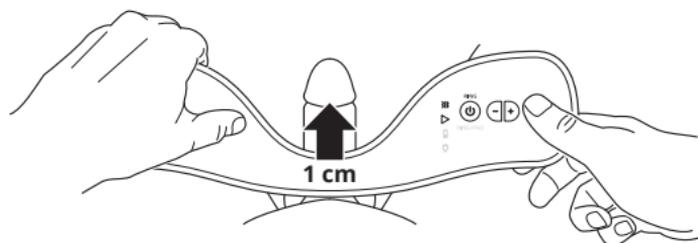

- Attendez que l'indicateur d'énergie RF s'allume à nouveau.
- Répétez les étapes 9 et 10 jusqu'à ce que le dispositif soit au niveau du gland et que vous ne puissiez plus le glisser davantage.
- Lorsque vous ne pouvez plus faire glisser le dispositif davantage vers le gland, relâchez le **bouton énergie** pour désactiver le mode traitement.
- Appuyez sur la **poignée de l'anneau** pour ouvrir l'**anneau**. Remontez le dispositif Vertica le plus près possible de votre corps pour poursuivre le traitement.



Le dispositif doit entrer en contact avec la zone pelvienne.

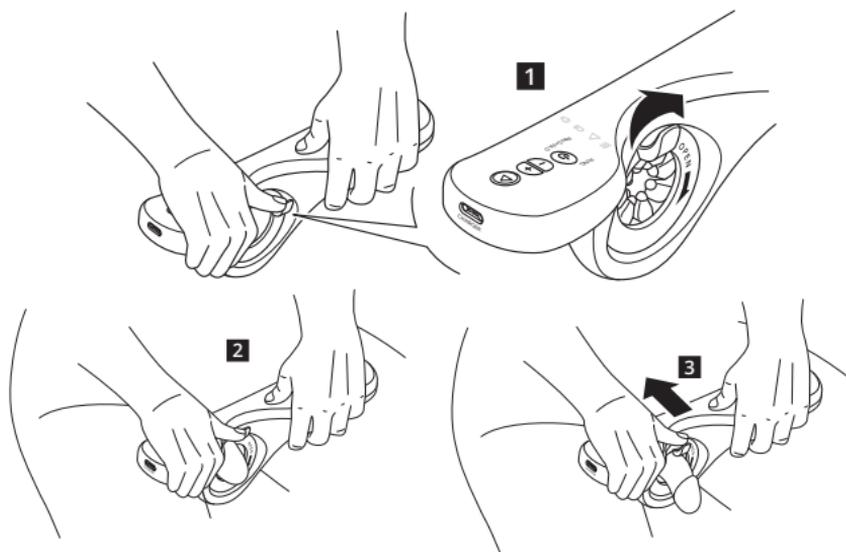

13. Relâchez doucement la **poignée de l'anneau** pour permettre aux électrodes RF de l'**anneau** d'entrer en contact avec la tige du pénis sans être trop serrées.




14. Répétez les étapes 7 à 13 jusqu'à ce que la durée totale du traitement ait atteint 15 minutes.



Le dispositif vibre plusieurs fois et les indicateurs du **mode ANNEAU** et du **mode ANNEAU+PATCH** clignotent pour indiquer que le traitement est terminé.

15. Appuyez sur la **poignée de l'anneau** pour ouvrir l'**anneau** et retirez le dispositif du pénis.

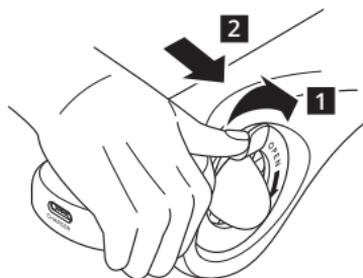



16. Appuyez sur le bouton d'alimentation/ mode traitement pour passer au mode ANNEAU+PATCH.

7.2.2 DEUXIÈME PARTIE DU TRAITEMENT (MODE ANNEAU+PATCH)

1. Appliquez une couche de gel (gel conducteur d'ultrasons ou de RF) de trois à cinq millimètres d'épaisseur sur le pénis. Veillez à couvrir toute la surface du pénis.




Pour garantir un traitement optimal, les dômes des électrodes RF de l'anneau doivent être recouverts de gel. Ajoutez du gel pendant le traitement si nécessaire.

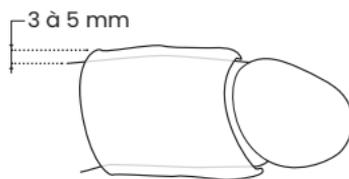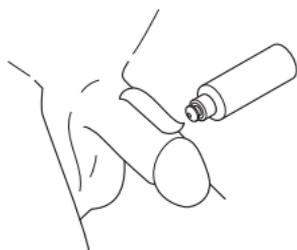

2. Connectez la **fiche du patch** au **port du patch**.




La fiche du patch magnétique ne se fixe que dans un seul sens. Modifiez la position de la fiche du patch si elle ne se connecte pas.

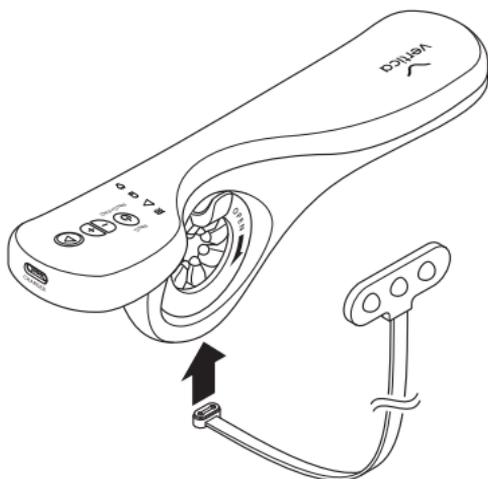

3. Recourbez le câble du **patch** sous le dispositif de manière à ce que les électrodes RF soient orientées vers le haut. Asseyez-vous sur une chaise et placez le **patch** sur votre périnée (la zone située entre le **scrotum** (a) et l'**anus** (b)).



Veillez toujours à ce que le patch soit en contact avec le périnée pendant toute la durée du traitement.

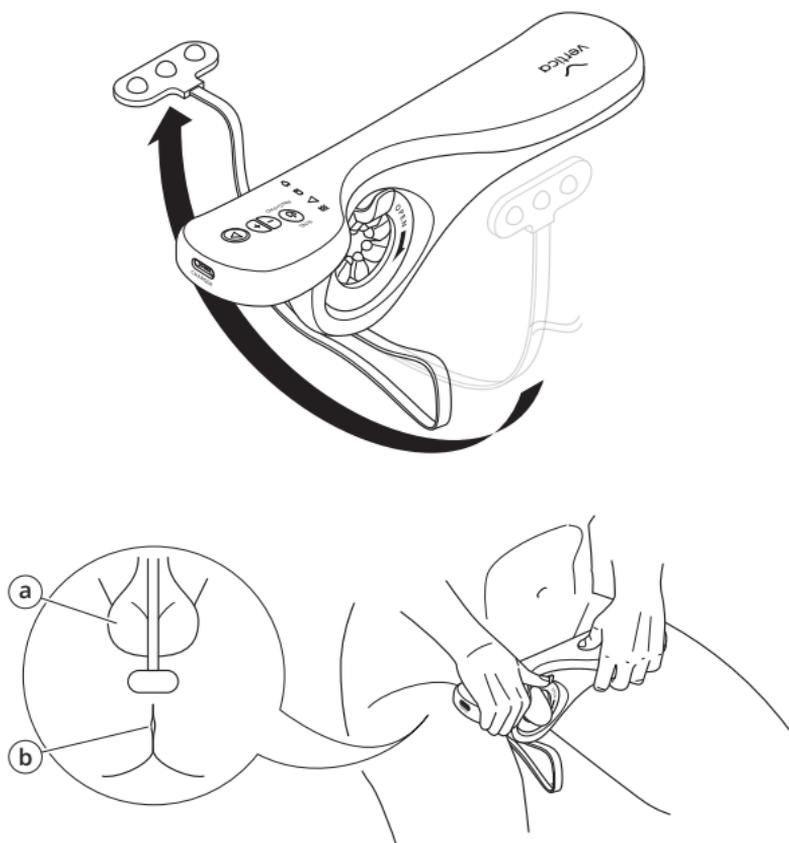

4. Veillez à bien sélectionner le mode **ANNEAU+PATCH** :

a. Le dispositif est éteint :

- i. Appuyez sur le **bouton d'alimentation/ mode traitement** pour allumer le dispositif.

Le dispositif est en mode veille. L'indicateur du mode ANNEAU s'allume et l'indicateur du niveau d'énergie affiche le niveau d'énergie un.

- ii. Appuyez sur le **bouton d'alimentation/ mode traitement** pour sélectionner le **mode ANNEAU+PATCH**.
L'indicateur du mode ANNEAU+PATCH s'allume et le mode ANNEAU est désactivé.
 - b. Lorsque le dispositif est allumé et que l'**indicateur du mode ANNEAU** est allumé :
 - i. Appuyez sur le **bouton d'alimentation/ mode traitement** pour sélectionner le **mode ANNEAU+PATCH**.
L'indicateur du mode ANNEAU+PATCH s'allume et le mode ANNEAU est désactivé.
5. Suivez les étapes 3 à 15 de la *Première partie du traitement (mode ANNEAU)*.
6. Appuyez pendant 3 secondes sur le **bouton d'alimentation/ mode traitement** pour éteindre le dispositif.



- Pendant la deuxième partie du traitement, l'énergie RF est délivrée par les électrodes RF de l'anneau et du patch.
- Une fois le traitement terminé, nettoyez et chargez le dispositif Vertica.

8 NETTOYAGE DU DISPOSITIF VERTICA

AVERTISSEMENT !



- Éteignez le dispositif avant de procéder au nettoyage.
- N'immergez jamais le dispositif dans l'eau ! Contentez-vous de rincer le dispositif. Le dispositif est résistant à l'eau au niveau des électrodes RF, mais il ne peut pas être immergé.
- Nettoyez toujours l'anneau et le patch après chaque utilisation.
- N'utilisez que de l'eau du robinet propre.
- Veillez à ne pas rincer à l'eau chaude pour éviter de vous brûler les mains.
- N'utilisez pas de détergents, de savon, d'alcool ou d'autres agents de nettoyage.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.




Scannez le code QR pour voir la vidéo de la procédure de nettoyage de Vertica.



Pour nettoyer le dispositif et les électrodes RF :

1. Veillez à
 - a. éteindre le dispositif ;
 - b. déconnecter la fiche magnétique du chargeur du port de chargement ;
 - c. déconnecter le patch du dispositif.


- Nettoyez le dispositif et le patch avec un chiffon humide ou une lingette à l'eau.

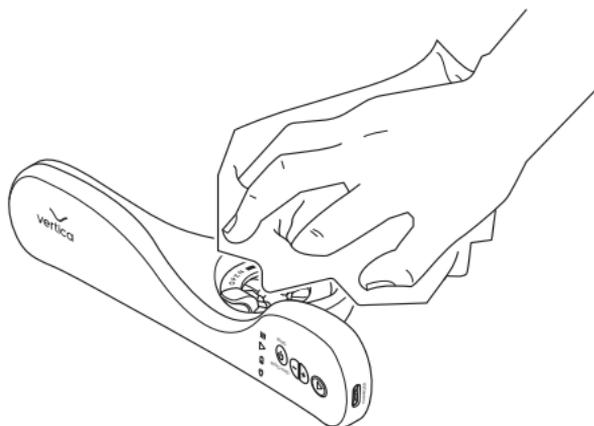

- Rincez les **électrodes RF** de l'**anneau** et du **patch** avec de l'eau du robinet et enlevez tous les résidus de gel. Si nécessaire, utilisez de l'eau chaude pour mieux dissoudre le gel.



AVERTISSEMENT ! N'immergez jamais le dispositif dans l'eau.

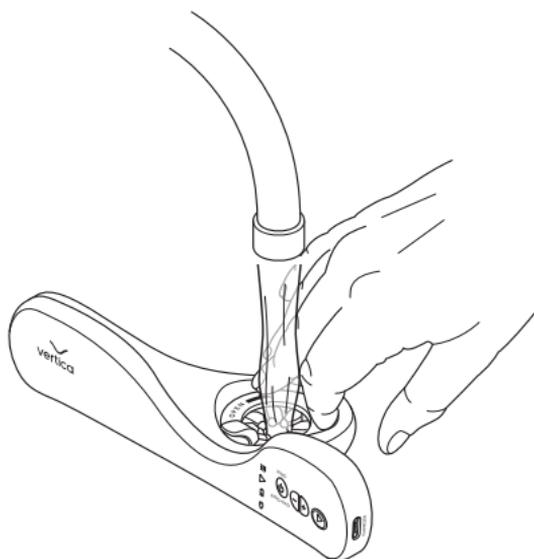

4. Assurez-vous que tous les résidus de gel sont entièrement éliminés et séchez soigneusement le dispositif et le patch à l'aide d'un chiffon propre et sec.

FABRICANT**Ohh-Med Medical® Ltd.**

Tsivonit St. 1, P.O. Box 89 Tiberias 1410002, Israël

Tél. : +972-4-9036999

E-mail : service@vertica-labs.com

Site Web : www.vertica-labs.com

REPRÉSENTANT DANS L'UE**G&D&Y**

Tolstraat 112,

1077 EL Amsterdam,

Pays Bas

Copyright © 2023 Ohh-Med Medical® Ltd.

Vertica® est une marque déposée de Ohh-Med Medical® Ltd.

Tous droits réservés. Technologie brevetée.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, SCANNEZ LE CODE QR



Date de publication Février 2024 | OH_Misc0021_RevD

