

OHHMED

تعليمات الاستخدام

التطبيق



انتبه! تطبيق Verticaplus يستخدم جنباً إلى جنب مع جهاز Verticaplus للحصول على تعليمات تفصيلية عن استخدام جهاز Verticaplus في تنفيذ العلاج، برجاء العودة إلى تعليمات استخدام Vertica أو إلى دليل البدء السريع (P/N OH_Misc0015). هذا الدليل يشير فقط إلى تشغيل تطبيق Verticaplus.



ما بين يديك هو التوجيهات الأصلية باللغة العربية

OH_Misc0008_RevF | April 2024

قائمة المحتويات

3	1	مقدمة
3		1.1 ملاحظات هامة
3		1.2 وصف المستخدم
3		1.3 الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل
4	2	تحميل وتثبيت تطبيق Verticaplus
5		2.1 تحميل وتثبيت تطبيق Verticaplus
5		2.1.1 تحميل التطبيق من متجر Apple's App Store
6		2.1.2 تحميل التطبيق من متجر Google's Play Store
6		2.2 تهيئة التطبيق وفتح حساب جديد
12	3	فهم واجهة المستخدم
14	4	استخدام التطبيق أثناء المعالجة بواسطة Verticaplus
15		4.1 استخدام التطبيق أثناء المعالجة بواسطة جهاز Verticaplus
17		4.2 مشاهدة الدرس التعليمي أثناء المعالجة
19		4.3 نتائج المعالجة
20	5	استخدام التقويم
21	6	تغيير الإعدادات
23	7	المزيد من الخيارات
24	8	تفسير للرسائل التي في التطبيق
26	9	خصوصية البيانات

1 مقدمة

1.1 ملاحظات هامة

تهانينا لحصولك على جهازك **Verticaplus** الجديد. طلبا لسلامتك ولنجاح المعالجات، نرجو منك:

- قراءة وفهم دليل المستخدم بأكمله قبل أن تستخدم جهازك **Verticaplus**.
- احتفظ بدليل التعليمات للرجوع إليه في المستقبل.
- برجاء قراءة وفهم تعليمات الاستخدام المرفقة مع جهاز **Verticaplus** الخاص بك قبل أن تستخدم هذا المنتج. حيث أنها تحتوي على معلومات مهمة من أجل السلامة.

1.2 وصف المستخدم

- هذه الوثيقة مخصصة للمستخدم المنزلي لجهاز **Verticaplus**.
- جهاز **Verticaplus** مخصص لاستخدام البالغين فقط.

1.3 الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل

- يشار إلى جهاز **Verticaplus** أيضا باسم "الجهاز" أو "**Verticaplus**" أو "المنتج".
- يشار إلى تطبيق **Verticaplus** أيضا باسم "التطبيق".
- الكلمات الداكنة تشير إلى مكونات المنتج.
- الكلمات المائلة تشير إلى عناوين الأقسام أو عناوين المستند المشار إليها في النص.
- أيقونة البطارية في جهاز **Verticaplus**، كما هي موضحة في الجدول أدناه، لها نفس الأداء الوظيفي الخاص بأيقونة البطارية التي في جهاز **Vertica**.

أيقونة البطارية في جهاز Verticaplus	أيقونة البطارية في جهاز Vertica
	

2 تحميل وتثبيت تطبيق VERTICAPLUS

تسجيل الدخول في التطبيق لا يمكن فعله إلا باستخدام جهاز Verticaplus. يوفر التطبيق تشكيلة من الخواص الفريدة الغير موجودة إلا في Verticaplus، بما فيها نوعية المعالجة والتعقب. يوصى بشدة باستخدام تطبيق Verticaplus مع جهاز Verticaplus بغير الحصول على جميع الفوائد. .



تطبيق Verticaplus يمكن أن يساعد في تحسين نتائج المعالجة عبر توفير فيديو إرشادي مفصل الخطوات عن كيفية استخدام جهاز Verticaplus وتقديم ملاحظات شخصية على الأداء ومؤشرات حسية. وهو يسمح برؤية الفترة التي استغرقها العلاج وبيانات إضافية لكي تصبح عمليات المعالجة فعالة لأقصى حد ممكن.

يمكن تعديل إعدادات جهاز Verticaplus بواسطة التطبيق لكي يتم تخصيص الضوابط بما يناسب الشخص بغية تحسين التجربة ونتائج المعالجة.

2.1 تحميل وتثبيت تطبيق VERTICAPLUS

اعتمادا على جهازك (إذا كان يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS)، يكون تحميل تطبيق Verticaplus من متجر Google's Play Store أو من متجر Apple's App Store. تستطيع أن تجده عبر البحث عن الكلمة "Verticaplus".



قم بتحميل Verticaplus من متجر
App Store



تحميل Verticaplus من متجر
Google Play



2.1.1 تحميل التطبيق من متجر APPLE'S APP STORE

1. من جهازك العامل بنظام iOS، افتح تطبيق متجر App Store.
 2. بداخل تطبيق App Store، استخدم خاصية البحث للعثور على Verticaplus.
 3. انقر على زر التحميل.
- سيتم تحميل التطبيق وتثبيته على جهازك العامل بنظام iOS.

ربما يُطلب منك إدخال كلمة مرورك لمعرف Apple أو استخدام تقنية التعرف عبر الوجه أو البصمة لتأكيد تنزيل التطبيق.



متجر App Store هو خدمة تحمل شعار شركة Apple وهو مسجل في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.

2.1.2 تحميل التطبيق من متجر Google Play Store

1. قم من جهازك العامل بنظام أندرويد بفتح تطبيق متجر Google Play Store. وفي شريط البحث، اكتب كلمة Verticaplus بغية العثور على Verticaplus. وسوف تظهر لك قائمة من التطبيقات على الشاشة.
2. انقر على تطبيق Verticaplus في القائمة بغية فتح الصفحة التي بها التطبيق.
3. انقر على زر التثبيت.
4. راجع الترخيصات الممنوحة للتطبيق وانقر على "موافق" لإعطاء الإذن المطلوب. سوف يتم تحميل التطبيق وتثبيته على جهازك العامل بنظام أندرويد.

متجر Google Play وعلامة Google Play المسجلة هي علامات تجارية تمتلكها شركة Google LLC.

2.2 تهيئة التطبيق وفتح حساب جديد

يوصى بشدة أن تستكمل الاستبيان وأن تفتح الحساب قبل أن تستخدم التطبيق لكي تستطيع أن تستمتع بكل المميزات والخواص التي تتيحها Verticaplus.



عند استخدام التطبيق للمرة الأولى، يكون هناك احتياج لإدخال بضعة تفاصيل شخصية بغية فتح حساب.



لكي تتمكن من تعيين التطبيق وفتح حساب جديد:

1. افتح تطبيق Verticaplus.
2. قم باختيار اللغة المطلوبة من صندوق القائمة المنسدلة ثم انقر على كلمة التالي. سيتم فتح شاشة الترحيب.
3. إذا كان لديك جهاز Verticaplus، انقر على نعم، هيا بنا نبدأ! واستمر إلى الخطوة 4.
4. إذا كنت لا تمتلكه، انقر على زيارة المتجر لكي تطلب جهاز Verticaplus.


للعودة إلى الشاشة السابقة، انقر على زر >.



4. قم بإدخال رقم هاتفك المحمول:
 - a. قم باختيار رمز البلد من القائمة المنسدلة أو استخدم خاصية البحث.

احرص على أن تقوم بتفعيل خاصية تحديد الموقع والسماح بالاتصال عبر البلوتوث في أجهزة الأندرويد.



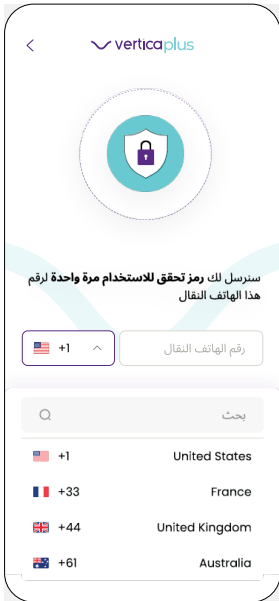


b. أدخل رقم هاتفك المحمول في حقل رقم الهاتف وبعدها انقر على "تسليم".

سوف يتم إرسال كلمة مرور تستخدم مرة واحدة إلى رقم الهاتف المحمول، وسوف يتم فتح شاشة إدخال كلمة المرور التي تستخدم مرة واحدة.

هذه العملية هدفها تأكيد رقم هاتفك المحمول باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة (OTP). كلمة المرور لمرة واحدة تُرسل في رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف الذي أدخلته. احرص على إدخال رقم هاتف شغال. بعد 15 محاولة لإدخال كلمة مرور لمرة واحدة خاطئة، سوف يتم قفل التطبيق لمدة خمس دقائق. في هذه الحالة، اتبع التعليمات التي تصدر عن التطبيق.

5. راجع الرسائل النصية القصيرة في هاتفك وقم بنسخ العدد المكون من أربعة أرقام إلى حقل إدخال كلمة المرور.

إذا كنت لم تتلقى رسالة نصية قصيرة، انقر على "إرسال" مجدداً.

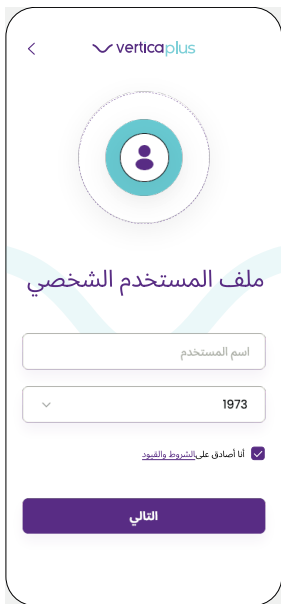

6. قم باختيار تذكرني بالنقر داخل المربع ثم انقر على تأكيد.
سيتم التأكد من كلمة المرور لمرة واحدة، وإذا كانت صحيحة سوف يتم فتح شاشة ملف التعريف الخاص بك.
7. أدخل اسمك أو لقب في حقل "اللقب".
8. قم باختيار سنة ميلادك من القائمة المنسدلة.
9. قم باختيار المربع بجوار أوافق لتأكيد موافقتك على الشروط والأحكام.

قبل أن تختار مربع الموافقة، تأكد من النقر على جملة "الشروط والأحكام" وقم بقراءة المحتويات.

i

10. انقر على التالي.
11. سوف يعرض تطبيق Verticaplus عليك استبيان IIEF-EF*.
قم باختيار إجابة واحدة لكل سؤال وانقر على تأكيد للانتقال إلى السؤال التالي.

نحن نوصي بشدة بالإجابة على استقصاء IIEF-EF* بصدق قبل بداية أول علاج للتأكد من أنه سيكون ممكنا مراقبة تقدم المعالجة بأكثر قدر ممكن من الدقة ويمكن تتبع التحسن.

*استبيان IIEF-EF – المؤشر الدولي لوظيفة الانتصاب - استبيان وظيفة الانتصاب

i

verticaplus

يتم الاتصال



تأكد من أن الفيرتيكا يعمل
الرجاء الانتظار...

12. إقران التطبيق مع جهاز Verticaplus:

- تأكد من أن خاصية البلوتوث بجهاز الهاتف المحمول في حالة تشغيل.
- ضع جهاز Verticaplus على وضع التشغيل (راجع تعليمات الاستخدام / ضبط الجهاز على وضع التشغيل *on* والإطفاء *off*).
يقوم التطبيق بالمشح آليا بحثا عن أقرب جهاز Verticaplus.



عند فشل الإقران، ولم يتم العثور على جهاز Verticaplus، تأكد من أن خاصية Bluetooth في جهازك المحمول في وضع التشغيل، وأن جهاز Verticaplus على وضع التشغيل ثم انقر على "أعد المحاولة".
إذا لم ينجح هذا في حل المشكلة، انقر على عبارة "اتصل بنا" للاتصال بدعم العملاء.

i

13. عند العثور على جهاز Verticaplus والانتهاؤ من الإقران معه، يتم إعداد التطبيق، وتكون عملية فتح الحساب ناجحة.

14. يعمل جهاز Verticaplus على إجراء فحص ذاتي.

سوف يقوم الجهاز بالاهتزاز للإشارة إلى أن الفحص الذاتي قد اكتمل.

15. انتظر حتى يكتمل الفحص الذاتي ثم انقر على التالي.

سيتم فتح الشاشة الرئيسية، ويصبح جهاز Verticaplus جاهز للاستخدام.

في حالة فشل الفحص الذاتي، انقر على أعد المحاولة لإعادة الفحص الذاتي مرة أخرى. إذا لم ينجح ذلك في حل المشكلة، انقر على "تجاهل" للاستمرار أو انقر على "اتصل بنا" للاتصال بدعم العملاء.

i

3 فهم واجهة المستخدم



الرقم	الوظيفة
1	مؤشر Vertica للإشارة إلى أن جهاز Verticaplus متصل مع التطبيق
2	مؤشر البطارية للإشارة إلى حالة بطارية جهاز Verticaplus.
3	زر التالي للانتقال إلى نتائج المعالجة
4	مؤشر مستوى الطاقة للإشارة إلى مستوى الطاقة (1 إلى 6) الصادرة عن جهاز Verticaplus
5	رسائل النظام لإعطاء تعليمات أو ملاحظات على الأداء العلاجي
6	مؤشر نوعية المعالجة للإشارة إلى نوعية المعالجة المعطاة اعتمادا على ما يتم تسليمه فعليا من طاقة الترددات اللاسلكية RF
7	زر الإعدادات لفتح قائمة الإعدادات
8	زر المزيد للوصول إلى قائمة تتضمن المزيد من الخيارات
9	زر الصفحة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية
10	زر التقويم لفتح تقويم تواريخ المعالجات
11	مؤشر مؤقت المعالجة للإشارة إلى مدة تنفيذ العلاج
12	مؤشر وضع العلاج للإشارة إلى أن وضع RING أو وضع RING+PAD فعال على جهاز Verticaplus
13	زر الدرس التعليمي لرؤية الدرس التعليمي (الدرس التعليمية يمكن مشاهدتها قبل المعالجة أو بعدها أو أثناءها. تستمر المعالجة أثناء الدرس التعليمي).
14	مؤشر العلاج للإشارة إلى أن العلاج قيد التنفيذ
15	مؤشر طاقة الترددات اللاسلكية للإشارة إلى توصيل طاقة الترددات اللاسلكية

4 استخدام التطبيق أثناء المعالجة بواسطة VERTICAPLUS

- بغية الاستفادة الكاملة من التطبيق وخواصه، يوصى بفتح التطبيق لتنفيذ المعالجات للتأكد مما يلي:
 - أن بيانات كل معالجة يتم مزامنتها إلى التطبيق بشكل فوري.
 - أن البيانات الفردية للمعالجة تم تخزينها مع تاريخ ووقت المعالجة. يتم تخزين معالجات متعددة في يوم واحد في صورة معالجات مختلفة.
- عندما لا يكون التطبيق مفتوحاً أثناء المعالجة يحدث ما يلي:
 - لا تتم مزامنة بيانات المعالجة مع التطبيق. يقوم جهاز Verticaplus بتخزين بيانات المعالجة الأساسية في ذاكرته الداخلية.
 - لا يقوم جهاز Verticaplus بتخزين تاريخ ووقت المعالجة الفردية. هو يقوم فقط بتسجيل الوقت الكلي لجميع المعالجات مجتمعة منذ آخر مرة كان متصلاً فيها مع التطبيق.
 - في المرة التالية التي سيتم فتح التطبيق فيها، ويكون جهاز Verticaplus متصلاً مع التطبيق، سوف يتم مزامنة وقت المعالجة الكلي إلى التطبيق. تتم إضافة وقت المعالجة الكلي إلى التقويم في اليوم والوقت الحالي.
- كل شهر، سوف يطلب منك التطبيق إكمال استبيان IIEF-EF لقياس تقدم المعالجة. إذا لم يتم إكمال الاستبيان، سوف يقوم التطبيق بإظهار الاستبيان في كل مرة يتم فيها فتح التطبيق.
- كل ثلاثة أشهر، سوف يطلب التطبيق إدخال كلمة مرور لمرة واحدة لأغراض أمنية. في هذه الحالة، اتبع التعليمات التي في التطبيق وراجع الرسائل النصية القصيرة لديك بحثاً عن كلمة مرور لمرة واحدة سوف يتم إرسالها إلى رقم الهاتف الذي تم تسجيله.



- بعد 15 محاولة لإدخال كلمة مرور لمرة واحدة خاطئة، سوف يتم قفل التطبيق لمدة 5 دقائق. في هذه الحالة، اتبع التعليمات التي تصدر عن التطبيق.
- بعد 3 ساعات من انعدام النشاط، سوف يقوم التطبيق بتسجيل الخروج ألبا.



4.1 استخدام التطبيق أثناء المعالجة بواسطة جهاز VERTICAPLUS



1. تأكد من أن خاصية البلوتوث بجهاز الهاتف المحمول الخاص بك في حالة تشغيل.
2. ضع جهاز Verticaplus على وضع التشغيل (انظر تعليمات الاستخدام | ضبط الجهاز على وضع التشغيل on والإطفاء off).
3. افتح تطبيق Verticaplus. سوف يعرض التطبيق الشاشة الافتتاحية. يظهر مؤشر Vertica ومؤشر البطارية عندما يتم توصيل جهاز Verticaplus.
4. يبدأ جهاز Verticaplus في إجراء فحص ذاتي. انتظر حتى ينتهي الفحص الذاتي.



في حالة فشل الفحص الذاتي، انقر على أعد المحاولة لإعادة الفحص الذاتي مرة أخرى.
إذا لم ينجح ذلك في حل المشكلة، انقر على "تجاهل" للاستمرار أو انقر على "اتصل بنا" للاتصال بدعم العملاء.

الضغط على زر الطاقة في جهاز Verticaplus سوف يقوم مباشرة بفتح الشاشة الرئيسية.

5. سيتم فتح الشاشة الرئيسية ويظهر عليها الرسالة Verticaplus جاهز للمعالجة. كلا من التطبيق وجهاز Verticaplus جاهزان للاستخدام.
6. ابدأ المعالجة عبر اتباع الخطوات التي في تعليمات الاستخدام | هيا بنا نبدأ المعالجة!

خلال المعالجة، يعرض التطبيق المعلومات التالية:

- يصبح مؤشر العلاج في حالة تشغيل عند الضغط على زر الطاقة في جهاز Verticaplus أو الضغط عليه مرتين (اعتمادا على الإعدادات).
- يصبح مؤشر طاقة الترددات اللاسلكية في حالة تشغيل عندما يتم تسليم طاقة الترددات اللاسلكية.
- يقوم مؤشر مؤقت المعالجة بعرض وقت المعالجة المُحدث.
- يبدأ مؤشر نوعية المعالجة عند نسبة 100% ويتم تحديثه خلال المعالجة اعتمادا على نوعية المعالجة.
- يصدر التطبيق التعليمات عندما يحين الوقت الواجب فيه تحريك جهاز Verticaplus إلى الموضع التالي على عمود القضيب.

4.2 مشاهدة الدرس التعليمي أثناء المعالجة

يستطيع التطبيق المساعدة في المعالجة بواسطة الدرس التعليمي. يمكن مشاهدة الدرس التعليمي في أي وقت خلال المعالجة.





لفتح فيديو الدرس التعليمي:

1. انقر على زر الدرس التعليمي.
2. يتم فتح فيديو الدرس التعليمي.
3. اضغط على زر "play" لبدء الفيديو.
4. بغية تخطي الخطوة الحالية والانتقال إلى الخطوة التالية أو السابقة في فيديو الدرس التعليمي، انقر على أزرار الأسهم.
5. لرؤية فيديو الدرس التعليمي في كامل الشاشة، انقر على المربع. بغية العودة إلى لتغيير إعدادات الصوت، انقر على أيقونة السماع.


4.3 نتائج المعالجة

تظهر نتائج المعالجة على الشاشة فيما يخص المعالجة الحالية عند الضغط على زر التالي أو التمرير في اتجاه اليسار على الشاشة الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة بيانات المعالجة عبر اختيار المعالجة من التقييم.

مثال على نتيجة معالجة كاملة بعد تنفيذ المعالجة مع فتح التطبيق.

نتائج المعالجة للمعالجات التي تمت بدون التطبيق لا يكون معها منحنى نوعية.

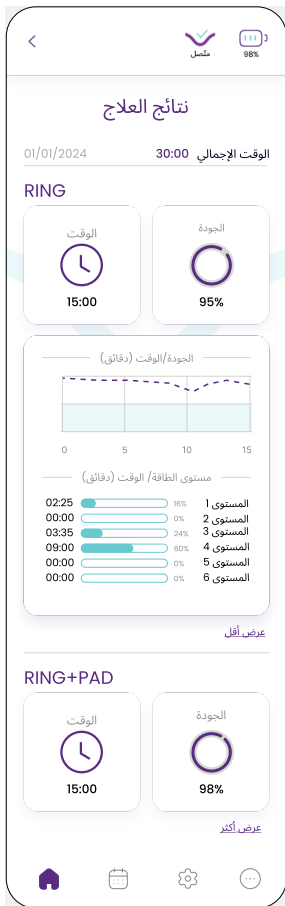


5 استخدام التقويم

1. انقر على زر التقويم في القائمة السفلية. يتم فتح التقويم على الشهر الحالي.

- الأيام التي يوجد لها بيانات معالجة تكون محاطة بدائرة.
- الأيام التي تمت فيها أكثر من معالجة واحدة يتم الإشارة إليها بنقاط تحت التاريخ.
- لعرض بيانات معالجة أقدم، انقر على الشهر أو السنة لتغييرها.

2. انقر على اليوم المحتوي على بيانات المعالجة.

بيانات المعالجة سوف تظهر على الشاشة.

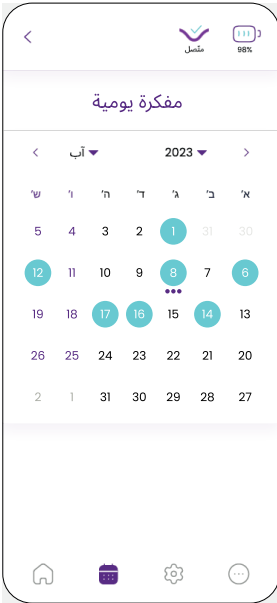


إذا كان اليوم هو يوم تمت فيه معالجات متعددة، سوف يظهر على الشاشة قائمة بأوقات المعالجات في ذلك اليوم. قم باختيار وقت المعالجة لكي ترى بيانات المعالجة المطلوبة.

وجود نقطة خضراء يشير إلى أن بيانات المعالجة تم تخزينها عندما كان التطبيق غير مستخدم.

تغيير الإعدادات

- لا يمكن تغيير الإعدادات التي تؤثر على جهاز Verticaplus عندما لا يكون جهاز Verticaplus متصلاً مع التطبيق. يرسل التطبيق رسالة لطلب توصيل جهاز Verticaplus إذا لم يكن متصلاً.
- انقر على أيقونة ؟ للحصول على شرح للإعدادات.

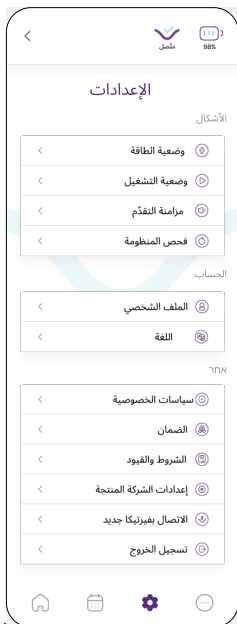

لتغيير الإعدادات:

1. في التطبيق، انقر على زر الإعدادات في القائمة السفلية. سوف يتم فتح صفحة الإعدادات.
2. انقر على إحدى الإعدادات لفتحها ورؤية خياراتها.
3. حدد الخيار المطلوب وانقر على تأكيد أو حفظ لضبط الاختيار الذي تم تحديده.

الإعدادات التالية متوفرة:

التهيئة

- **وضع الطاقة**
اضبط وضع الطاقة في جهاز Verticaplus على عادي (الوضع الافتراضي) أو على تكيفي للحصول على حساسية أكبر.
- **وضع التشغيل**
اضبط خاصية الإقفال على زر الطاقة لكي تصبح بالنقر مرتين (الوضع الافتراضي) أو الضغط المستمر.
- **موقت التقدم**
اضبط الصوت و/ أو الاهتزاز لكي يشير إلى أنه قد حان الوقت الواجب فيه تحريك جهاز Verticaplus إلى الموضع التالي على عمود القضيب.
- **الفحص الذاتي**
لكي يتم السماح لجهاز Verticaplus بأن يبدأ الفحص الذاتي.

الحساب

- **ملف التعريف**
لكي يتم إدخال اللقب، عام الميلاد، رقم الهاتف المحمول.
- **اللغة**
لكي يتم اختيار اللغة المستخدمة في التطبيق، والبيانات وشكل كتابة الوقت، ويوم وأسبوع البداية.

خلاف ذلك

- **سياسة الخصوصية**
لكي يتم إظهار سياسة الخصوصية.
- **الضمان**
لكي يتم إظهار معلومات الضمان.
- **الشروط والأحكام**
لكي يتم إظهار الشروط والأحكام.

- الإعدادات الافتراضية
- لكي يتم إظهار المعلومات المرتبطة بالتطبيق وبجهاز Verticaplus.
- الإقتران مع جهاز Vertica جديد
- لاقتران جهاز Verticaplus جديد مع التطبيق.
- تسجيل الخروج
- لكي يتم تسجيل الخروج من تطبيق Verticaplus.

7 المزيد من الخيارات

انقر على زر المزيد لكي:

- تشاهد دليل Vertica للبدء السريع
- تشاهد تعليمات Vertica للاستخدام
- تشاهد تعليمات تطبيق Verticaplus للاستخدام
- طلب الجبل الموصل للترددات اللاسلكية
- الاتصال بدعم العملاء
- زيارة موقعنا على الإنترنت



8 تفسير للرسائل التي في التطبيق

يعرض التطبيق رسائل على الشاشة خلال الاستخدام. قم باتباع الحلول أدناه لحل أي مشكلة.

الرسائل التي في التطبيق	التفسير/ الحل
Vertica جاهز للمعالجة	للإشارة إلى انتهاء الفحص الذاتي بنجاح وأن جهاز Verticaplus مستعد للمعالجة.
استمر! أنت تبلي حسنا!	للإشارة إلى أن العلاج يحقق تقدما جيدا.
Vertica جاهز لمواصلة معالجتك	للإشارة إلى أن العلاج لم يكتمل حتى الآن. الاستمرار في المعالجة.
بدء جلسة RING+PAD	للإشارة إلى أن معالجة RING+PAD لم تبدأ بعد. بدء معالجة RING+PAD
بدء جلسة RING	للإشارة إلى أن معالجة RING لم تبدأ بعد. بدء معالجة RING.
برجاء نقل Vertica إلى الموضع التالي	قم بتحريك جهاز Verticaplus إلى الموضع التالي على عمود القضيبي.
البطارية منخفضة، قم بشحن جهاز Vertica	البطارية في جهاز Verticaplus منخفضة. قم بشحن جهاز Verticaplus (انظر تعليمات الاستخدام شحن جهاز Vertica)
تحسين الاتصال/ أضف المزيد من الجل	التلامس بين أقطاب التردد اللاسلكي وبين بشرة القضيبي ليس جيدا. <ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن أقطاب التردد اللاسلكي متلامسة بشكل جيد مع البشرة في عمود القضيبي. تأكد من وجود قدر كاف من الجل على عمود القضيبي.
لا يوجد تلامس	لا يوجد تلامس بين أقطاب التردد اللاسلكي وبين بشرة عمود القضيبي. <ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنه تم إيلاج القضيبي في الحلقة الخاصة بجهاز Verticaplus. تأكد من أن أقطاب التردد اللاسلكي متلامسة بشكل جيد مع البشرة في عمود القضيبي. تأكد من وجود قدر كاف من الجل على عمود القضيبي.

الرسائل التي في التطبيق	التفسير / الحل
لكي يتم تغيير التهيئة، يجب أن يكون جهاز Verticaplus متصلاً	جهاز Verticaplus ليس متصلاً مع التطبيق. <ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن خاصية البلوتوث في جهازك المحمول في وضع التشغيل. ضع جهاز Verticaplus على وضع التشغيل. تأكد من أن جهاز Verticaplus متصل مع التطبيق. انظر استخدام التطبيق أثناء المعالجة بواسطة جهاز Verticaplus
لإغلاق مستوى الطاقة، اضغط مرتين على جهاز Vertica	اضغط على زر الطاقة مرتين لإغلاق زر الطاقة.
بغية إغلاق مستوى الطاقة، اضغط باستمرار لمدة 5 ثواني ثم حرره في جهاز Vertica	لإغلاق زر الطاقة في هذا الوضع، اضغط على زر الطاقة باستمرار لمدة 5 إلى 10 ثواني ثم حرره.
يرجى عدم العلاج والاتصال بنا	للإشارة إلى وجود مشكلة في جهاز Verticaplus. أوقف المعالجة واتصل بدعم العملاء.

9 خصوصية البيانات

عندما يكون تطبيق Verticaplus نشطا، يتم مزامنة بيانات معالجتك أليا إلى الخوادم السحابية التي تستخدمها شركة Ohh-Med Medical Ltd.

يستخدم جهاز Verticaplus وكذلك تطبيق Verticaplus لوغار يتم تشفير قوي خلال عمليتي إرسال واستقبال البيانات بين جهاز Verticaplus والتطبيق، وبين الخوادم السحابية. يكون تخزين بياناتك وهي مشفرة ومُجهلة. يكون حق الوصول إلى بياناتك محصورا على العاملين المرخص لهم بهدف توفير دعم العملاء وتتبع الجهاز فقط. بغية حذف بياناتك كمستخدم أو تحديث رقم هاتفك، تفضل بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى service@vertica-labs.com.

يتم تخزين البيانات واستخدامها لكي:

- تكون المعالجة مخصصة – يستخدم التطبيق بيانات المعالجة لتوفير ملاحظات على الأداء تراكمية عن نوعية المعالجة.
- الاحتفاظ بتاريخ المعالجة – يحتفظ التطبيق بسجلات عن المعالجات السابقة، مما يسمح للمستخدمين بمراجعة تاريخ معالجتهم وتقييم مدى التقدم بمرور الوقت.

يتوافق كلا من جهاز Verticaplus وتطبيق Verticaplus مع معايير الأمن التالية:

- IEC 62304:2006 + AMD1:2015 CSV – Medical Device Software – Software Life Cycle Processes, Edition 1.1
- الإرشادات الخاصة بمحتويات البرامج المقدمة قبل التسويق والمستخدم في الأجهزة الطبية
- الاسترشاد MDCG 2019-16 بشأن الأمن السيبراني للأجهزة الطبية

- محتويات ما يتم تقديمه قبل التسويق لإدارة الأمن السبراني في الأجهزة الطبية.
- تطبيق إدارة المخاطر EN ISO 14971:2012 / ISO 14971:2019
- IEC 62366-1:2015 الجزء 1: تطبيق قابلية الاستخدام الهندسي على الأجهزة الطبية

كن دائماً مستعد مع Vertica.

الجهة الصانعة

.Ohh-Med Medical® Ltd

Tsivonit St. 1, P.O. Box 89 Tiberias 1410002, Israel

هاتف: +97249036999

البريد الإلكتروني: service@vertica-labs.com

الموقع: www.vertica-labs.com

الممثل في الاتحاد الأوروبي

G&D&Y

,Tolstraat 112

,EL Amsterdam 1077

هولندا

.Copyright © 2024 Ohh-Med Medical® Ltd

©Vertica علامة تجارية مسجلة مملوكة لشركة Ohh-Med Medical® Ltd

جميع الحقوق محفوظة. تقنية مسجلة بحق اختراع.



 **vertica**