

 **vertica**[®]





מדריך שימוש מקוצר

⚠ לתשומת ליבך!


מכשיר ה- Vertica[®] מיועד לטיפול רפואי אישי ואינטימי בבית. המכשיר יצא ממפעלנו כשהוא נקי ומוכן לשימוש. המכשיר ייחשב כ"משומש" לאחר הסרה או פתיחה של המדבקה והחבק שעל המכשיר.


תודה שבחרת ב- Vertica®! המדריך יציג בפניך צעד אחר צעד כיצד להשתמש במכשיר בצורה נוחה ויעילה.

1 הכר את VERTICA®

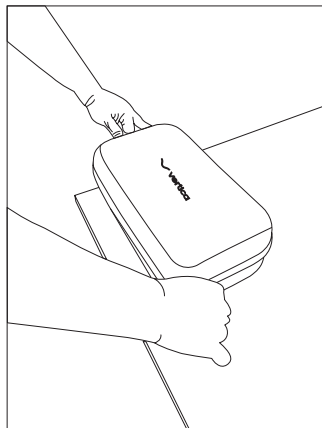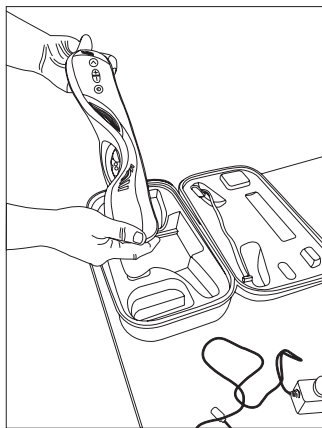

פתח את מארז Vertica® והוצא את המכשיר.
הכר את כל הכפתורים והמחוונים במכשיר Vertica®:

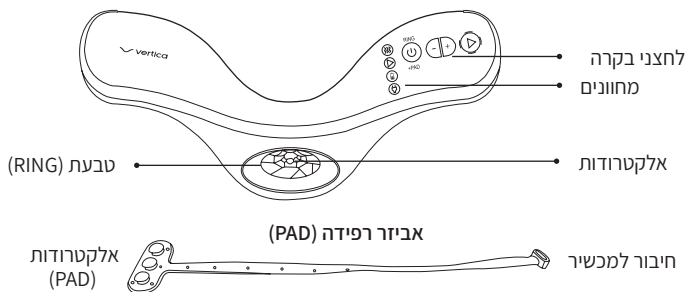

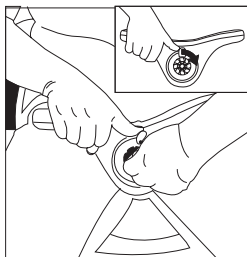

◀ על מנת להכניס את הפין דרך הטבעת, פתח את טבעת Vertica® על ידי סיבוב הידית עם כיוון השעון. ניתן למצוא את הידית בחלק הקדמי של המכשיר. הכנס את איבר מינך דרך הטבעת והצמד את המכשיר קרוב ככל האפשר לגופך. כעת, חזור את הידית לאחור כדי לאפשר לטבעת לחבוק את הפין.

3 כעת אתה מוכן לטיפול - קדימה מתחילים!

1. לחץ על לחצן ההפעלה (⊕) וודא כי מצב RING מופעל.

2. כוון את לחצן האנרגיה (▶) לרמה הרצויה באמצעות לחצני (◀▶).

3. התחל עם רמה 1 ועלה לרמה גבוהה יותר בהתאם לתחושה הנוחה לך.



4. לחץ לחיצה ארוכה על כפתור האנרגיה (▶) כדי להתחיל בטיפול, נורית LED ▶ כחולה תהבהב, ואחריה נורית LED (⊗) לבנה תדלוק ברציפות כאשר הפרמטרים של העור נכונים.

5. הזז את המכשיר קדימה בכ-1 ס"מ מדי כל 30 שניות, או בכל פעם שנורית ה-LED (⊗) הלבנה כובה, למשך 3 שניות לפחות ברציפות. התקדם עד עטרת הפין בלבד.

6. כשאינ יותר מקום להתקדם, שחרר את לחצן המכשיר - פעולה זו עוצרת את פלט האנרגיה באופן מיידי. פתח את הטבעת בעזרת הידית, חזור את המכשיר לבסיס הפין וחזור על התהליך.

7. לאחר שימוש של כ-15 דקות (חייוו על כך ניתן ע"י נורית LED (⊗) לבנה), המכשיר יאותת על גמר הטיפול באמצעות 3 רטיטות קצרות.


8. לחידוש הטיפול חזור על סעיף 4 בשלב זה.

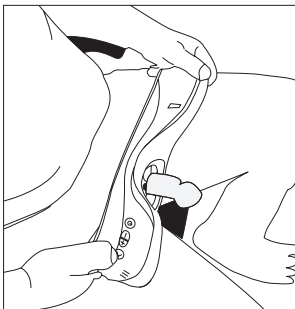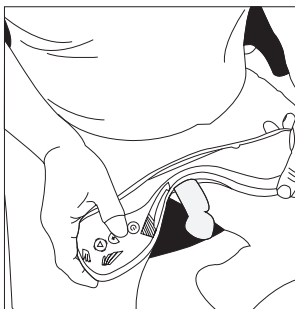

כעת תרגיש תחושת חמימות נעימה.

לתשומת ליבך:

- ◀ להזרמת אנרגיה רציפה עד לסיום הטיפול, החזק את לחצן האנרגיה ▶ למשך 3 שניות ולאחר מכן לחץ עליו 2 לחיצות קצרות.
- ◀ לחיצה על כל אחד מהלחצנים במכשיר תפסיק את הזרמת האנרגיה.
- ◀ בעת הזרמת אנרגיה רציפה, נוריות ה-LED סביב לחצן האנרגיה יבהבו ונורית LED כחולה תדלוק באופן קבוע.
- ◀ כאשר הטיפול יסתיים (כ-15 דקות של נורית LED לבנה), הזרמת האנרגיה תיפסק עם 3 רטיטות רצופות.

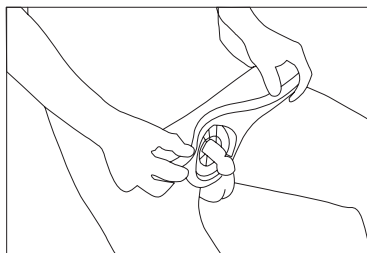


זהירות:

- ⚠ אין ללחוץ על כפתור האנרגיה בעת הזזת המכשיר לאורך הפין.
- ⚠ התקדם עם המכשיר קדימה בלבד, לא אחורנית.
- ⚠ אם אינך מרגיש תחושת חמימות נעימה במהלך הטיפול, נסה להוסיף עוד ג'ל או להגביר את רמת האנרגיה.

4 מצב 'RING+PAD'


חבר את אביזר ה-PAD באמצעות המחבר המגנטי המתאים שבתחתית המכשיר.

העבר את המכשיר למצב 'RING+PAD' על ידי לחיצה על לחצן 'Power' (נורית RING+PAD דולקת).

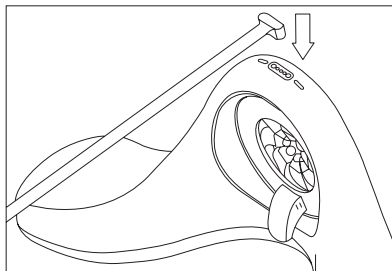


ודא שרצועת ה-PAD פונה החוצה מהגוף.

שב על האלקטרודות הממוקמות בקצה הרפידה. ודא שהן במגע רציף עם העור באיזור הפרינאום שבין שק האשכים לפי הטבעת.

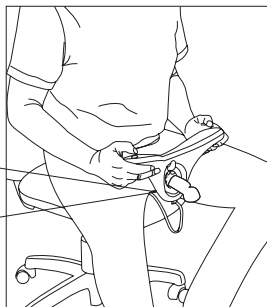


יש לחזור על הטיפול במשך 15 דקות נוספות בהתאם להוראות בסעיף 3, כאשר אביזר הרפידה מחובר ונורית החיווי RING+PAD דולקת. הקפד להזיז את המכשיר קדימה כ-1 ס"מ כל 30 שניות, או כאשר נורית ה-LED הלבנה כובה למשך 3 שניות לפחות.

מיקום ה-PAD - מבט מלמטה

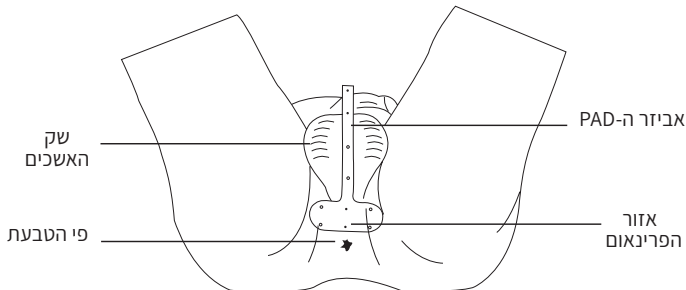


לחץ למשך 3 שניות

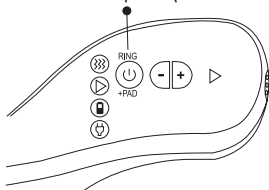

5 כיבוי המכשיר


בתום הטיפול, כבה את המכשיר ע"י לחיצה רצופה על לחצן ההפעלה (⏻) במשך 3 שניות.

6 חובה לנקות את המכשיר לאחר הטיפול

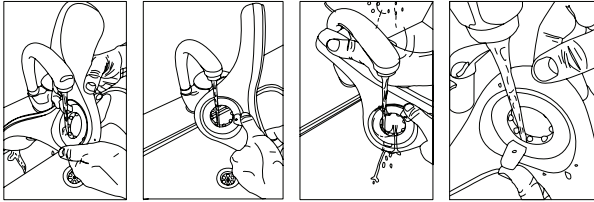


- ◀ בסיום הטיפול, עליך לנקות את אביזר הרפידה ואת איזור הטבעת שבמכשיר עם מים זורמים.
- ◀ הקפד לפתוח את איזור הטבעת ולנקות היטב בין האלקטרודות.
- ◀ וודא שלא נותרו שאריות ג'ל.
- ◀ יש לייבש את המכשיר עם מטלית יבשה.
- ◀ אי ניקוי של המכשיר לאחר השימוש, עלול לגרום להיצטברות שאריות ג'ל בתוך הטבעת ולפגוע בפעילותו התקינה של המכשיר.

7 טעינה ואחסון המכשיר

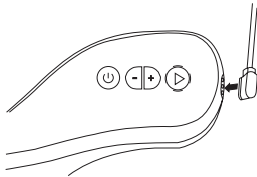

- ◀ לאחר הניקוי, הטען את המכשיר במשך 5 שעות לפחות. לא ניתן יהיה לבצע שימוש במכשיר כאשר הוא במצב טעינה. על מנת לטעון את המכשיר, כבל הטעינה חייב להיות מחובר קודם לחיבור המגנטי (Connector Charger) שנמצא על דופן המכשיר בצמוד ללוח הבקרה. רק אז חבר את הכבל אל שקע החשמל שבקיר.

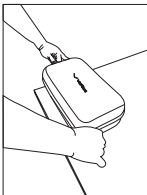

- ◀ בסיום הטעינה, מומלץ להכניס את המכשיר והאביזרים חזרה אל האריזה, כך שישמרו בצורה טובה ומוגנת. הקפד לסגור את האריזה עם הרוכסן כדי שלא יפלו ממנה אביזרים.

לפרטים נוספים סרקו
את קוד QR



תאריך: נובמבר 2021 | OH_Misc0027_RevA

+972-53-3660396

Support@vertica-labs.com

www.vertica-labs.com

