

 vertica®





دليل المستخدم للبدء السريع

⚠ يرجى الملاحظة!


صُمم جهاز Vertica® للعلاج الطبي الشخصي والحميمي في المنزل.
خُرج الجهاز من مصنعنا نظيفًا وجاهزًا للاستخدام.
سيتم اعتبار الجهاز "مستعملًا" بعد إزالة أو إتلاف ختم دليل العبث الموجود على الجهاز.

شكرًا لك على اختيارك® Vertica!
سيوضح لك هذا الدليل خطوة بخطوة كيفية استخدام
الجهاز بسهولة وفعالية.

1 تعرف على جهازك الخاص من Vertica®

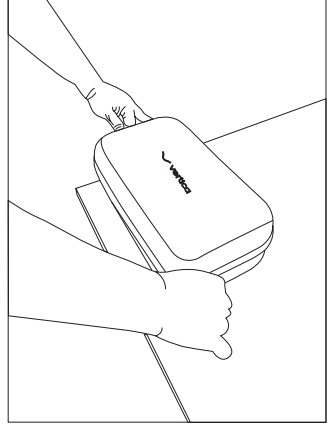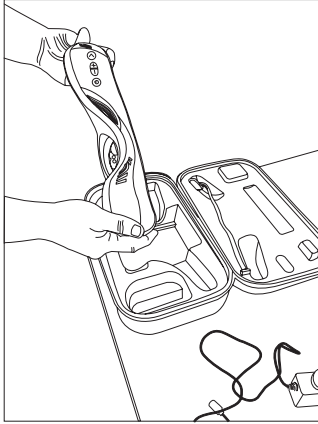

افتح حقيبة® Vertica. وأخرج الجهاز. تعرّف على جميع الأزرار والمؤشرات الموجودة
على جهاز® Vertica:

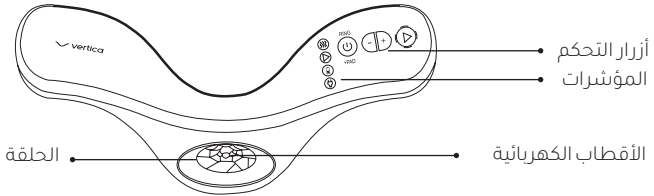

● مؤشرات ● أزرار التحكم

توصيل الطاقة جارٍ. متناوبات الجلد في النطاق الصحيح (حسبما تشير إليه الإضاءة المتواصلة لمصباح LED الأبيض)

تمكين الجهاز من إصدار الطاقة يُشار إلى ذلك بمصباح LED أزرق وامض . ويتحول إلى ضوء أزرق ثابت بعد التفريغ المزدوج.

(يتم إعطاء إشارة إلى ذلك من خلال ضوء LED يرتقالي يعمل باستمرار، وسوف ينطفئ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل)


مزدود طاقة متصل (حسبما تشير إليه الإضاءة المتواصلة لمصباح LED الأخضر)

مؤشر الوضع

تقليل مستوى الطاقة

زيادة مستوى الطاقة



الإشارة إلى مستوى التشغيل (٦ مستويات)

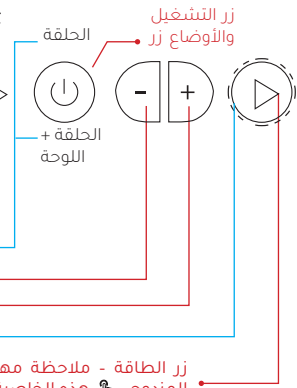


زر الطاقة - ملاحظة مهمة: من الممكن قفل هذه الوظيفة من خلال التفريغ المزدوج $\times 2$. هذه الخاصية مفعلة فقط بعد ضغط واحدة لمدة ٥ ثوانٍ (حسبما تشير إليه الإضاءة المتواصلة لمصباح LED الأزرق ▷). اضغط على أي زر على الجهاز لإلغاء القفل.

2 جلس مستريحًا واسترخ وأعد نفسك لتلقي المعالجة

اجلس في مكان مريح وهادئ. ادهن طبقة سخية من جل الأولتراساوند/ RF على طول القصب لتغطية السطح بالكامل. اهتم بأن تغطي طبقة الجل قبة القطب بنحو 3 - 5 ملم كما يظهر في الرسم في الجهة اليسرى. أضف الجل بحسب الحاجة خلال المعالجة.

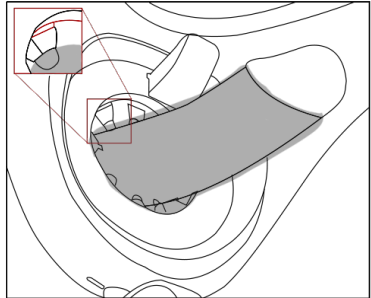
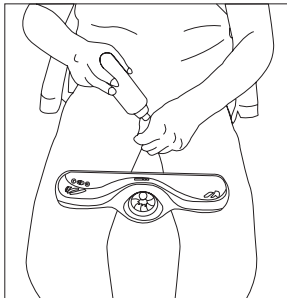


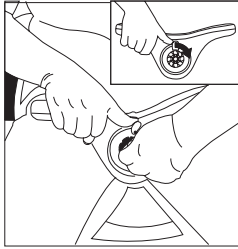

« لإدخال القضيب في الحلقة. افتح حلقة Vertica® من خلال تدوير [1] المقبض في اتجاه عقارب الساعة. ستجد المقبض في الجهة الأمامية للجهاز. أدخل قضيبك عبر الحلقة وقرب الجهاز إلى جسمك إلى أقصى درجة ممكنة. ثم أعد المقبض إلى وضعه السابق لتثبيت الحلقة حول قضيبك في وضع مريح.

3 أنت الآن مستعد للمعالجة - لنبدأ!

1. اضغط على زر «Power» (Ⓜ) (التشغيل) وتأكد من أن وضع «Ring» (الحلقة) قيد التشغيل.
2. اضبط مستوى الطاقة (▶) على مستوى الخرج المرغوب فيه (Ⓜ).
3. ابدأ بالمستوى 1 ثم انتقل إلى مستوى أعلى وفقاً للإحساس المطلوب.
4. اضغط على زر «Energy» (▶) (الطاقة) ضغطاً متواصلاً لبدء المعالجة، سوف يومض مصباح LED الأزرق، ويتبعه مصباح LED الأبيض الذي يضيء (Ⓜ) إضاءة متواصلة عندما تكون متناوبات الجلد صحيحة.
5. حرك الجهاز إلى الأمام بنحو 1 سم كل 3 ثانية، أو كلما ينطفئ مصباح LED الأبيض. علي أن يكون التحريك متواصلاً لمدة 3 ثوانٍ. تقدم حتى حشفة القضيب فقط.
6. إذا لم يتبق مساحة لتحريك الجهاز إلى الأمام، اضغط على زر الطاقة لإيقافه قبل تحريك الجهاز، فذلك يوقف خرج الطاقة فوراً. افتح الحلقة باستخدام المقبض، وأعد الجهاز إلى موضعه السابق عند قاعدة القضيب، ثم كرر العملية.
7. بعد إجراء عملية توصيل الطاقة لمدة 10 دقيقة (Ⓜ) (حسبما تشير إليه إضاءة مصباح LED الأبيض)، سيشير الجهاز إلى انتهاء الجلسة من خلال الاهتزاز 3 مرات مستمرة. يعتمد الوقت الإجمالي للمعالجة على خصائص الجلد للفرد. اضغط على زر الطاقة لمدة ثانية واحدة للتبديل إلى وضع «Ring + Pad».

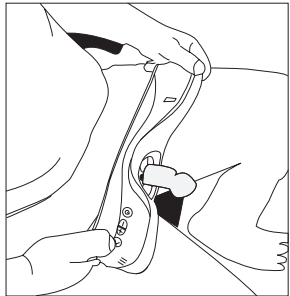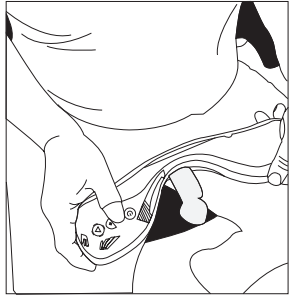

8. استكمال المعالجة. كرر الأمر من الخطوة رقم 4.

من المفترض أن تشعر بإحساس لطيف ودافئ.

انتبه:

- ▶ لإطلاق الطاقة المتواصل إلى أن تكتمل المعالجة، استمر في الضغط على زر 'Energy' ▷ (الطاقة) [3]لمدة ه ثوانٍ، ثم انقر عليه نقرًا مزدوجًا.
- ▶ الضغط على أي زر من أزرار الجهاز سيوقف إطلاق الطاقة المتواصل.
- ▶ عند إطلاق الطاقة المستمر، ستومض شرائط الطاقة حول الزر باستمرار، كما سيضيء مصباح LED الأزرق إضاءة متواصلة.
- ▶ عند انتهاء المعالجة، أي عندما يضيء مصباح LED الأبيض بعد مضي ١٥ دقيقة، سيهتز الجهاز ثلاث مرات متتالية إشارة إلى توقف خرج الطاقة.

احترس:




⚠ حرك الجهاز إلى الأمام فقط، وليس إلى الخلف..

⚠ إذا لم تشعر بإحساس دافئ على الجلد في أثناء الجلسة، فيجب عليك إما إضافة المزيد من الجل أو زيادة مستوى الطاقة.


4 وضع 'RING+PAD' (الحلقة+اللوحة)

غيّر وضع الجهاز إلى وضع 'RING+PAD' (الحلقة+اللوحة) من خلال الضغط على زر 'Power' (التشغيل).
وصّل الملحق اللوحى بالجهاز من خلال (موصّل اللوحة) المخصص له.

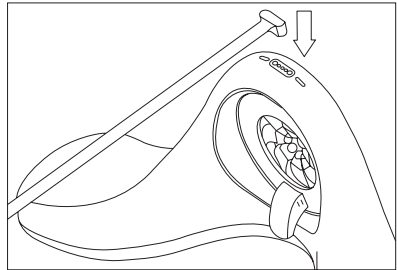


يجب أن يكون كابل اللوحة متجهًا نحو الأمام بعيدًا عن جسمك.

اجلس على الأقطاب الكهربائية الموجودة في طرف اللوحة. احرص على أن تكون ملائمة لجلدك في منطقة العجان باستمرار بين الصفن والمستقيم (فتحة الشرج).

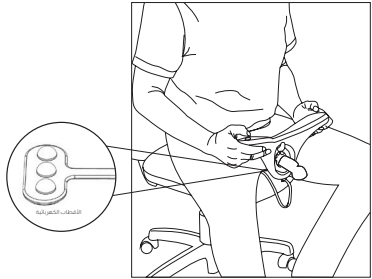


كرر المعالجة مرة أخرى لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة وفقًا للإرشادات الواردة في القسم ٣. مع توصيل الملحق اللوحي وتشغيل وضع اللوحة + الحلقة. احرص على تحريك الجهاز إلى الأمام بنحو ١ سم كل ٣٠ ثانية، أو كلما ينطفئ مصباح LED الأبيض. لمدة ٣ ثوانٍ على الأقل. في نهاية العلاج (١٥ دقيقة LED أبيض) ، سيتوقف تدفق الطاقة مع اهتزازات ثلاثة أمتار.

اللوحة - المنظر من أسفل

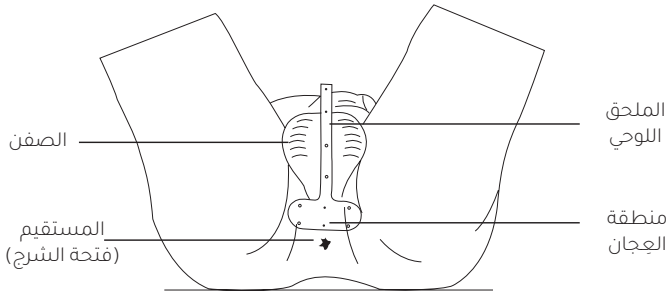


اضغط لمدة ٣ ثوانٍ.

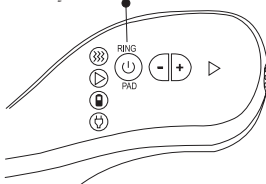

5 أوقف تشغيل الجهاز


عند انتهاء المعالجة، أوقف تشغيل الجهاز من خلال الضغط على زر التشغيل ضغطة مستمرة (⏻) لمدة ٣ ثوانٍ.

6 من المهم تنظيف الجهاز بعد المعالجة

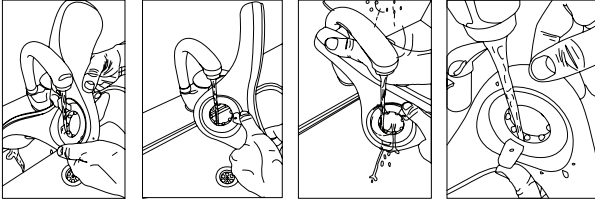


- ◀ عند انتهاء المعالجة، من الضروري تنظيف الملحق اللوحي ومنطقة الحلقة في الجهاز باستخدام الماء الجاري العادي..
- ◀ افتح منطقة الحلقة ونظف بين الأقطاب جيداً.
- ◀ تأكد من خلوها من بقايا الجل.
- ◀ جفف الجهاز بمنشفة جافة نظيفة.
- ◀ إن عدم تنظيف الجهاز بعد الاستخدام قد يؤدي إلى تراكم الجل في الأجزاء الميكانيكية للحلقة ويؤدي إلى خلل في تشغيل الجهاز.

7 شحن الجهاز وتخزينه

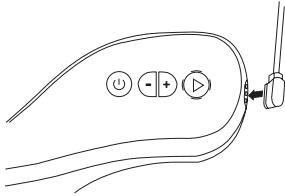

- ◀ لشحن الجهاز، يجب أن يكون كابل الشحن متصلاً بالوصلة المغناطيسية (موصل الشاحن) الموجود على جانب الجهاز بجوار لوحة التحكم. وعندئذ فقط، يمكنك توصيل الكابل بمقبس الكهرباء، وشحنه لمدة ه ساعات على الأقل.

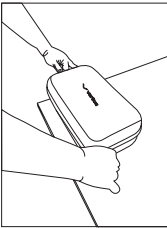

- ◀ بعد انتهاء شحن الجهاز بالكامل، يوصى بإعادة الجهاز والملحقات إلى الحقيبة للمحافظة عليها وحمايتها.
- ◀ احرص على إغلاق العبوة باستخدام السحاب لتجنب سقوط الملحقات منها.



لتفاصيل إضافية
QR امسحوا رمز ال



OH_Misc0028_RevC | تاريخ الإصدار: مارس 2023

+972-4-9036999

Support@vertica-labs.com

www.vertica-labs.com

vertica®