

הוראות שימוש

אפליקציה



לתשומת ליבך! אפליקציית Verticaplus נועדה לשימוש יחד עם מכשיר Verticaplus. לקבלת הוראות מפורטות לשימוש במכשיר Verticaplus לביצוע טיפול, עיין בהוראות השימוש של Vertica או במדריך השימוש המקוצר (P/N OH_Misc0014). מדריך זה מתייחס רק לתפעול אפליקציית Verticaplus.



אלו ההוראות המקוריות באנגלית מתורגמות לעברית.

תוכן עניינים

3	1. הקדמה
3	1.1 הערות חשובות
3	1.2 תיאור המשתמש
3	1.3 מוסכמות המשמשות במדריך זה
4	2. הורדה והתקנה של אפליקציית VERTICAPLUS
5	2.1 הורדה והתקנה של אפליקציית VERTICAPLUS
5	2.1.1 הורדת האפליקציה מה- APP STORE של אפל
6	2.1.2 הורדת האפליקציה מחנות PLAY של GOOGLE
6	2.2 הגדרת האפליקציה והרשמה
12	3. הבנת ממשק המשתמש
14	4. שימוש באפליקציה במהלך הטיפול עם VERTICAPLUS
15	4.1 שימוש באפליקציה במהלך הטיפול במכשיר VERTICAPLUS
17	4.2 צפייה בסרטון ההדרכה במהלך הטיפול
19	4.3 תוצאות הטיפול
20	5. שימוש בלוח השנה
21	6. שינוי ההגדרות
23	7. אפשרויות נוספות
24	8. הסבר על הודעות בתוך האפליקציה
26	9. פרטיות נתונים

1 הקדמה

1.1 הערות חשובות

- ברכות על מכשיר ה- Verticaplus® החדש שלך. למען בטיחותך והצלחת הטיפולים:
- קרא בעיון והבן את המדריך המלא למשתמש לפני השימוש במכשיר Verticaplus שלך.
 - שמור את מדריך ההוראות לעיון עתידי.
 - קרא והבן את הוראות השימוש הכלולות במכשיר Verticaplus שברשותך לפני השימוש במוצר זה. הוא מכיל מידע בטיחותי חשוב.

1.2 תיאור המשתמש

- ברכות על מכשיר ה- Verticaplus® החדש שלך. למען בטיחותך והצלחת הטיפולים:
- מסמך זה מיועד למשתמש הביתי במכשיר Verticaplus.
 - מכשיר Verticaplus מיועד למבוגרים בלבד.

1.3 מוסכמות המשמשות במדריך זה

- מכשיר Verticaplus מוזכר גם כ'מכשיר', 'Verticaplus' או 'מוצר'.
- אפליקציית Verticaplus מכונה גם 'האפליקציה'.
- מלל מודגש מציין רכיבים של המוצר.
- מלל נטוי מציין מקטעים או כותרות פרסומים המוזכרים בטקסט.
- סמל הסוללה במכשיר Verticaplus, כפי שמוצג בטבלה שלהלן, כולל
- פונקציונליות זהה לזו של סמל הסוללה במכשיר Vertica.

סמל הסוללה במכשיר Verticaplus	סמל הסוללה במכשיר Vertica
	

2 הורדה והתקנה של אפליקציית VERTICAPLUS

תהליך הרישום לאפליקציה מסתיים עם שיוך מכשיר Verticaplus. ממולץ מאוד להירשם לאפליקציה לפני שימוש במכשיר Verticaplus כדי לקבל את כל היתרונות, כגון איכות הטיפול ומעקב טיפולים.



אפליקציית Verticaplus מייעלת ומשפרת את תוצאות הטיפול עם משוב מותאם אישית וסרטון הדרכה לצפייה. ניתן לצפות בסרטון במהלך הטיפול ולצפות בנתונים נוספים כדי להפוך את הטיפולים ליעילים ככל האפשר.

ניתן לשנות את ההגדרות של מכשיר Verticaplus באמצעות האפליקציה בכדי להתאים אישית את הפרמטרים ולשפר את חווית המשתמש ותוצאות הטיפול.

2.1 הורדה והתקנה של אפליקציית

בהתאם למכשיר שלך (מערכת ההפעלה Android או iOS), אפליקציית Verticaplus מותקנת מחנות Google Play או מחנות האפליקציות של Apple. ניתן למצוא אותה על ידי חיפוש "Verticaplus".



Verticaplus



הורד את Verticaplus ב-Google Play



הורד את Verticaplus ב-App Store

2.1.1 הורדת האפליקציה מה-APP STORE של אפל

1. במכשיר iOS, פתח את האפליקציה App Store. הדלק את מכשיר ה-Verticaplus (ראה הוראות שימוש / הגדרת המכשיר למצב מופעל וכבוי). האפליקציה סורקת אוטומטית את מכשיר ה-Verticaplus הקרוב ביותר.
2. ביישום App Store, בסרגל החיפוש הקלד
3. הקש על הלחצן 'הורד' האפליקציה תורד ותותקן במכשיר ה-iOS שלך.

ייתכן שתבקש להזין את סיסמת ה-Apple ID שלך או להשתמש ב-Face ID/Touch ID כדי לאשר את הורדת האפליקציה.



App Store הינו סימן שירות של Apple Inc. הרשום בארה"ב ובמדינות ובאזורים אחרים.

2.1.2 הורדת האפליקציה מחנות של GOOGLE

1. במכשיר Android, פתח את היישום Google Play Store.
2. הקש על אפליקציית Verticaplus ברשימה כדי לפתוח את הדף של האפליקציה.
3. הקש על **Install**.
4. סקור את הרשאות האפליקציה והקש על **Accept** כדי להעניק את ההרשאות הדרושות.
האפליקציה תורד ותותקן במכשיר האנדרואיד שלך.
Google Play והלוגו של Google Play הם סימנים מסחריים של Google LLC.

2.2 הגדרת האפליקציה והרשמה

מומלץ מאוד למלא את השאלון ולהירשם באפליקציה לפני השימוש במכשיר כדי ליהנות מכל היתרונות והתכונות של Verticaplus.



כאשר נעשה שימוש באפליקציה בפעם הראשונה, יש להזין מספר פרטים אישיים בכדי להירשם.

כדי להירשם לאפליקציה:

1. פתח את אפליקציית Verticaplus
2. בחר את השפה הרצויה מהתיבה הנפתחת והקש על **הבא**. מסך הפתיחה נפתח.
3. אם יש לך את Verticaplus, **הקש על כן!** בואו נתחיל והמשך לשלב 4.
- אם לא, הקש על **בקר בחנות** כדי להזמין את מכשיר ה-Verticaplus שלך.




כדי לחזור למסך הקודם,
הקש על < **הלחצן**.

i

4. הזן את מספר הטלפון הנייד שלך:
א. בחר את קידומת המדינה שלך
מהרשימה הנפתחת או השתמש
בסרגל החיפוש.

הקפד להפעיל את המיקום
ואת הרשאות הבלוטות'
במכשירי Android.

i

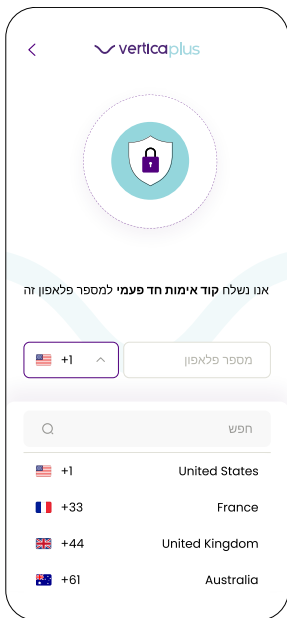

ב. הזן את מספר הפלאון הנייד בשדה מספר פלאפון והקש על אישור. קוד אימות חד-פעמי ישלח למספר הפלאפון הנייד ומסך הזנת קוד האימות יפתח.


מספר הפלאפון הנייד שלך מאומת באמצעות קוד חד פעמי (OTP). ה-OTP נשלח על ידי SMS למספר הפלאפון שהזוין. הקפד להזין מספר פלאפון נייד פעיל. לאחר 15 ניסיונות להזין OTP שגוי, האפליקציה תנעל למשך חמש דקות. במקרה זה, המשך בהתאם להוראות באפליקציה.



5. בדוק את הודעות ה-SMS שלך והעתק את המספר בן ארבע הספרות לשדה הסיסמה.

אם לא קיבלת הודעת sms, הקש על שלח שוב.



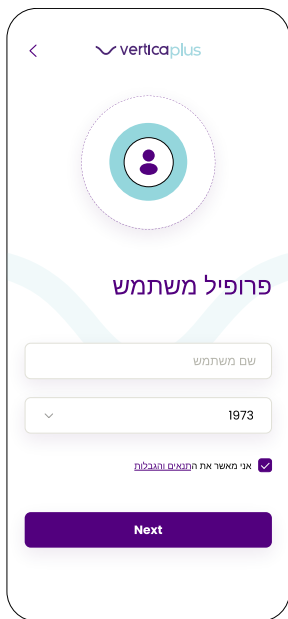

6. בחר בתיבת הסימון **זכור אותי** והקש על אישור ה-OTP **מאומת** וכאשר הוא נכון, מסך הפרופיל שלך נפתח.
7. הזן את שמך או כינוי בשדה '**כינוי**'.
8. בחר את שנת הלידה שלך מהרשימה הנפתחת.
9. בחר בתיבת הסימון **מאשר** כדי לאשר את התנאים וההגבלות.

לפני בחירה בתיבת הסימון 'מסכים', הקפד להקיש על התנאים וההתניות ולקרוא את התוכן.



10. הקש על **הבא**.
 11. אפליקציית Verticaplus **מציגה את שאלון** *IIEF-EF.
- בחר תשובה אחת לכל שאלה והקש על הבא כדי להמשיך לשאלה הבאה.

אנו ממליצים בחום לענות על שאלון *IEF-EF בכנות לפני תחילת הטיפול הראשון כדי לוודא שניתן לעקוב אחר התקדמות הטיפול בצורה מדויקת ככל האפשר וניתן לעקוב אחר שיפורים.

*שאלון IEF-EF - מדד בינלאומי לתפקודי זיקפה - שאלון תפקוד זיקפה

i

verticaplus

מתחבר



ודא שהורטיקה דלוק
אנא המתן...

12. שיוך האפליקציה למכשיר Verticaplus:


א. ודא שהבלוטות 'במכשיר הנייד מוגדר למצב מופעל.

ב. הגדר את מכשיר Verticaplus למצב מופעל (ראה הוראות

שימוש | הגדרת המכשיר למצב מופעל וכבוי).

האפליקציה סורקת ומחפשת באופן אוטומטי את מכשיר ה- Verticaplus הקרוב

ביותר.

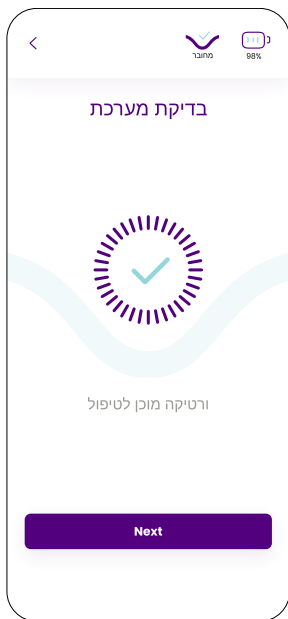

כאשר השייך נכשל ומכשיר Verticaplus לא נמצא, ודא שהבלוטות' של המכשיר הנייד מופעל, מכשיר Verticaplus במצב מופעל והקש על נסה שוב אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, הקש על צור קשר כדי לפנות לתמיכת הלקוחות.


i

13. כאשר מכשיר Verticaplus שויך, האפי' ליקציה מוגדרת וההרשמה היסתיימה בהצלחה.
14. מכשיר Verticaplus יבצע בדיקת מע' רכת. המכשיר ירטוט כדי לציין שבדיקת המערכת הושלמה.

במקרה שהבדיקת מערכת נכשלת, הקש על נסה שוב כדי לבצע שוב את בדיקת המערכת . אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, הקש על דלג כדי להמשיך או הקש על 'צור קשר' כדי ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות.

i

3 הכרת ממשק המשתמש

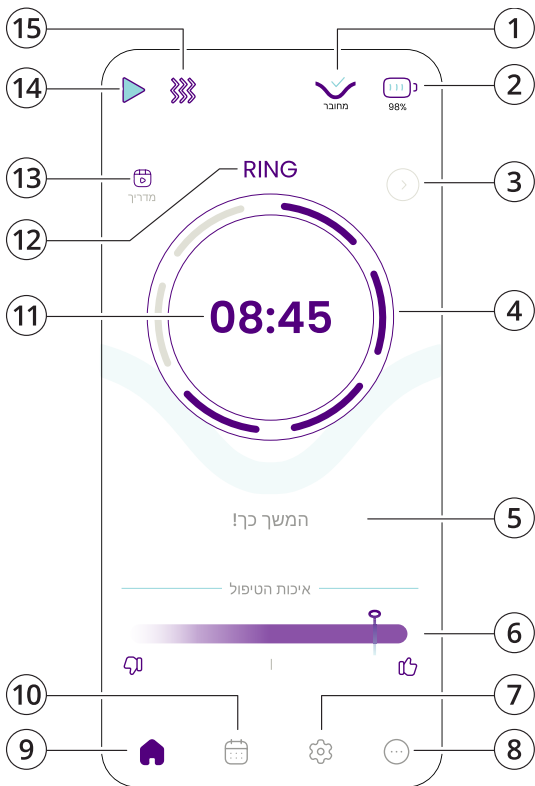

מזהה	פונקציה
1.	חיווי Vertica מחובר מצייין שמכשיר Verticaplus מחובר לאפליקציה
2.	חיווי סוללה מצייין את מצב הסוללה של מכשיר Vertica-plus.
3.	לחצן 'הבא' ניווט לתוצאות הטיפול
4.	חיווי רמת אנרגיה מצייין את רמת האנרגיה (1 עד 6) של מכשיר Verticaplus
5.	הודעות מערכת מתן הוראות או משוב לטיפול
6.	חיווי איכות הטיפול מצייין את איכות הטיפול בהתבסס על פרמטרי הטיפול.
7.	לחצן 'הגדרות' פתיחת ההגדרות
8.	לחצן 'עוד' גישה לתפריט עם אפשרויות נוספות
9.	לחצן הבית חזרה למסך הראשי
10.	לחצן 'לוח שנה' פתיחת יומן הטיפולים
11.	חיווי טיימר טיפול מצייין את משך זמן הטיפול
12.	חיווי מצב טיפול מצייין שמצב RING או RING+PAD פעיל במכשיר Verticaplus.
13.	הדרכת שימוש ב-Vertica הדרכת הדרכה בווידאו. ניתן לצפות בהדרכה לפני, אחרי או במהלך הטיפול.
14.	חיווי טיפול מצייין שהטיפול פעיל
15.	חיווי אנרגיית גלי רדיו הצגת העברה של אנרגיית גלי רדיו

4 שימוש באפליקציה במהלך הטיפול עם VERTICAPLUS

- כדי לעשות שימוש מלא באפליקציה ובתכונותיה, מומלץ לפתוח את האפליקציה בעת ביצוע הטיפולים בכדי לוודא:
 - הנתונים של כל טיפול מסתכרנים עם האפליקציה באופן מיידי.
 - נתוני הטיפול הפרטניים נשמרים עם התאריך והשעה של הטיפול.
- כאשר האפליקציה אינה פתוחה במהלך הטיפול:
 - נתוני הטיפול אינם מסתכרנים עם האפליקציה. מכשיר Verticaplus מאחסן נתוני טיפול בסיסיים בזיכרון הפנימי שלו.
 - מכשיר Verticaplus אינו שומר את התאריך והשעה של טיפולים בודדים. הוא מאחסן רק את הזמן הכולל של כל הטיפולים יחד מאז הפעם האחרונה שהוא התחבר לאפליקציה.
 - בפעם הבאה שהאפליקציה תפתח, ומכשיר ה-Verticaplus יסנוכרן לאפליקציה, זמן הטיפול הכולל מסונכרן עם האפליקציה. זמן הטיפול ואיכות הטיפול משוכללים יתווספו ללוח השנה ביום ובשעה הנוכחיים.
- בכל חודש, האפליקציה תבקש למלא שאלון IIEF-EF כדי למדוד את התקדמות הטיפול. אם השאלון לא מולא, האפליקציה תציג את השאלון בכל פעם שהיא תפתח.




- כל שלושה חודשים, האפליקציה תבקש להזין סיסמת OTP מטעמי אבטחה. במקרה זה, עקוב אחר ההוראות באפליקציה ובדוק את הודעות ה-SMS שלך עבור סיסמת ה-OTP שנשלחה למספר הטלפון הרשום.
- לאחר 15 ניסיונות להזין OTP שגוי, האפליקציה תנעל למשך 5 דקות. מקרה כזה, פעל בהתאם להוראות באפליקציה.
- לאחר 3 שעות של חוסר פעילות, האפליקציה תתנתק באופן אוטומטי.



4.1 שימוש באפליקציה במהלך הטיפול במכשיר VERTICA-PLUS



1. ודא שהבלוטות' במכשיר הנייד מוגדר למצב מופעל.
2. הגדר את מכשיר Verticaplus למצב מופעל (ראה הוראות שימוש | הגדרת המכשיר למצב מופעל וכבוי).
3. פתח את אפליקציית Verticaplus. האפליקציה תציג את מסך הפתיחה. חיווי Vertica וחיווי הסוללה נדלקים כאשר מכשיר Verticaplus מחובר.
4. מכשיר Verticaplus יתחיל בבדיקת מערכת. המתן עד להשלמתה

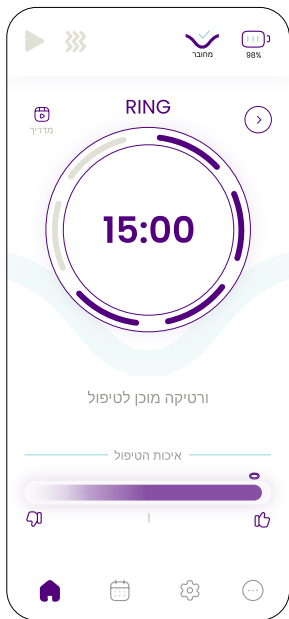

במקרה שהבדיקת מערכת נכשלת, הקש על נסה שוב כדי לבצע שוב את הבדיקת מערכת.

אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, הקש על דלג כדי להמשיך או הקש על 'צור קשר' כדי ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות.

לחיצה על לחצן האנרגיה במכשיר Verticaplus תפתח ישירות את המסך הראשי.

i

5. המסך הראשי יפתח ויציג את ההודעה 'ורטיקה מוכן לטיפול'. האפליקציה ומכשיר Verticaplus מוכנים לשימוש.
6. התחל את הטיפול על ידי ביצוע השלבים בהוראות השימוש | באו נתחיל עם הטיפול!

במהלך הטיפול, האפליקציה תציג את המידע הבא:

- חייווי הטיפול מופעל כאשר לוחצים על לחצן האנרגיה במכשיר Verticaplus (בהתאם להגדרות).
- חייווי אנרגיית גלי הרדיו יופעל כאשר אנרגיית גלי הרדיו מועברת.
- חייווי טיימר הטיפול יציג את זמן הטיפול המעודכן.
- מד איכות הטיפול מתחיל מ-100% ומתעדכן במהלך הטיפול בהתאם לאיכות הטיפול.
- האפליקציה מורה מתי הגיע הזמן לקדם את מכשיר Verticaplus למיקום הבא על הפין.

4.2 צפייה בסרטון ההדרכה במהלך הטיפול

האפליקציה יכולה לסייע בטיפול באמצעות סרטון הדרכה. ניתן לצפות בסרטון ההדרכה בכל עת במהלך הטיפול.



כדי לפתוח את סרטון ההדרכה:


1. לחץ על לחצן ההדרכת Vertica.
2. לחץ על לחצן ההדרכה יפתח. סרטון ההדרכה יפתח.
3. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להתחיל את הסרטון. כדי לדלג על השלב הנוכחי ולעבור לשלב הבא או הקודם בסרטון ההדרכה, לחץ על לחצני החצים.
4. לצפייה בסרטון ההדרכה במסך מלא, לחץ על הריבוע. כדי לחזור.
5. כדי לשנות את הגדרות עוצמת הקול, לחץ על סמל הרמקול.



4.3 תוצאות הטיפול


תוצאות הטיפול מוצגות על המסך עבור הטיפול הנוכחי בעת לחיצה על לחצן 'הבא' או החלקה שמאלה במסך הראשי. בנוסף, צפייה בנתוני הטיפול אפשרית על ידי בחירת טיפול מתוך לוח השנה. דוגמה לתוצאת טיפול מלאה לאחר פתיחת טיפול שנעשה באמצעות האפליקציה.

לטיפולים שבוצעו ללא האפליקציה אין אפשרות להציג את גרף האיכות

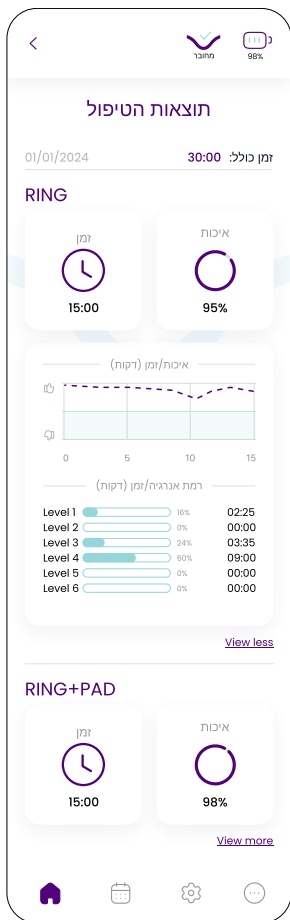

5 שימוש בלוח השנה

1. הקש על לחצן לוח השנה בחלונית התחתונה. לוח השנה יפתח בחודש הנוכחי.

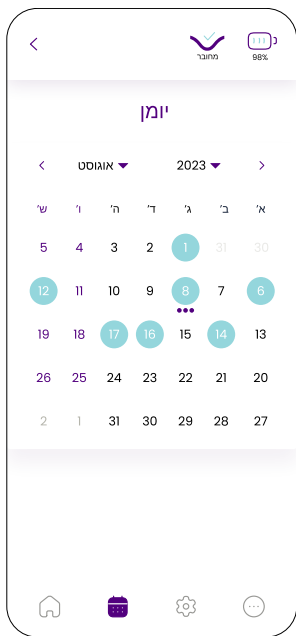

- במהלך הטיפול, האפליקציה תציג את המידע הבא:
- הימים שיש בהם נתוני טיפול מוקפים בעיגול מלא.
 - ימים שיש בהם יותר מטיפול אחד מסומנים עם נקודות מתחת לתאריך.
 - כדי לראות נתוני טיפול ישנים יותר, הקש על החודש או השנה כדי לשנות אותם.

2. הקש על יום עם נתוני טיפול. נתוני הטיפול יוצגו על המסך.


אם מדובר ביום עם מספר טיפולים, המסך מציג רשימה של זמני הטיפול באותו יום. בחר את זמן טיפול כדי לראות את נתוני הטיפול. נקודה ירוקה מציינת נתוני טיפול שנשמרו כאשר האפליקציה לא הייתה בשימוש.

- לא ניתן לשנות התצורות המשפיעות על מכשיר Verticaplus כאשר המכשיר אינו מחובר לאפליקציה. האפליקציה תספק הודעה לביצוע חיבור מכשיר Verticaplus אם הוא אינו מחובר.
- הקש על סמל ? - לקבלת הסבר על ההגדרה.



כדי לשנות את ההגדרות:

1. באפליקציה, הקש על הגדרות בחלונית התחתונה. דף ההגדרות נפתח.
2. הקש על ההגדרה הרצויה.
3. בחר באפשרות הרצויה והקש על **אשר** או **שמור** כדי להגדיר את האפשרות שנבחרה.

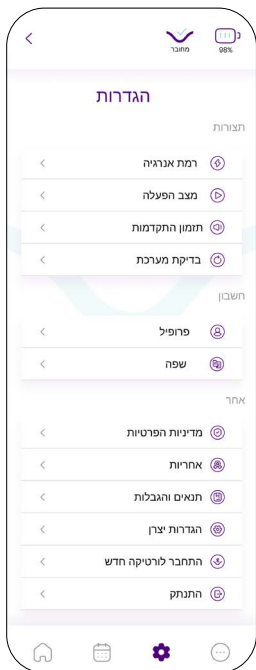

הגדרות הבאות זמינות:

תצורות

- **רמת אנרגיה**

הגדרת מצב האנרגיה של מכשיר Verticaplus למצב רגיל (ברירת מחדל) או מותאם לקבלת רגישות רבה יותר.

- **מצב הפעלה**

הגדרת פונקציית הנעילה של לחצן האנרגיה ללחיצה כפולה (ברירת מחדל) או לחיצה רציפה.

- **תזמון התקדמות**

הגדרת צליל 1 / או רטט כדי לציין מתי הגיע הזמן להזיז את מכשיר Verticaplus למיקום הבא על הפין.

- **בדיקת מערכת**

כדי לאפשר למכשיר Verticaplus להתחיל בביצוע בדיקת המערכת.

חשבון

- **פרופיל**

הגדרת שם המשתמש, שנת הלידה ומספר הפאלפון הנייד.

- **שפה**

הגדרת השפה עבור האפליקציה, את תבנית התאריך ויום תחילת השבוע ביומן.

אחר

- **מדיניות פרטיות**

הצגת מדיניות הפרטיות.

- **אחריות**

הצגת פרטי האחריות.

- **תנאים והגבלות**


הצגת התנאים וההגבלות.

- הגדרות יצרן
- הצגת מידע והגדרות הקשורות לאפליקציה ולמכשיר Verticaplus.
- התחבר לורטיקה חדש
- שיוך מכשיר Verticaplus חדש לאפליקציה.
- התנתק
- התנתקות מאפליקציית Verticaplus.

7 אפשרויות נוספות

הקש על More כדי:

- להציג את מדריך השימוש המקוצר של Vertica
- להציג את הוראות השימוש של Vertica
- להציג את הוראות השימוש באפליקציית Verticaplus
- להזמין ג'ל מוליך
- ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות
- מעבר לאתר

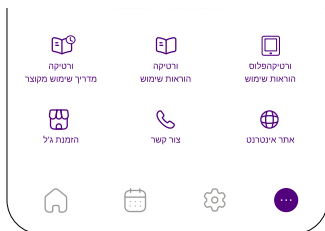

8 הסבר על הודעות בתוך האפליקציה

האפליקציה מציגה הודעות על המסך במהלך השימוש. בצע בהתאם לפתרונות / הסברים הבאים בכדי לפתור בעיות.

הודעה בתוך האפליקציה	הסבר/פתרון
Vertica מוכן לטיפול	מצוין שמכשיר Verticaplus מוכן לטיפול.
המשך כך! / טיפול מעולה!	מצוין שהטיפול מתקדם כנדרש.
Vertica מוכן להמשך טיפול	מצוין שהטיפול עדיין לא הושלם. המשך בטיפול.
התחל טיפול RING+PAD	מצוין שהטיפול במצב RING+PAD עדיין לא החל. התחל את הטיפול במצב RING+PAD.
התחל טיפול RING	מצוין שהטיפול במצב RING עדיין לא התחיל. התחל את בטיפול RING.
אנא קדם את ורטיקה למיקום הבא	העבר את מכשיר Verticaplus למיקום הבא על הפין.
סוללה נמוכה, טען את ורטיקה	הסוללה של מכשיר Verticaplus חלשה. טען את מכשיר Verticaplus (ראה הוראות שימוש טעינת מכשיר Vertica)
שפר מגע/ תוסיף עוד ג'ל	המגע בין אלקטרודות אנרגיית גלי הרדיו לבין העור של הפין אינו טוב. <ul style="list-style-type: none"> • ודא שהאלקטרודות במגע טוב עם העור של הפין. • ודא שיש מספיק ג'ל על הפין.

הסבר/פתרון	הודעה בתוך האפליקציה
<p>אין מגע בין האלקטרודות של המכשיר לבין העור של הפין.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ודא שהפין מוכנס לטבעת של מכשיר Verticaplus. • ודא שהאלקטרודות במגע טוב עם העור של הפין. • ודא שיש מספיק ג'ל על הפין. 	<p>אין מגע</p>
<p>מכשיר Verticaplus אינו מחובר לאפליקציה.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ודא שהבלוטות' מוגדר למצב מופעל במכשיר הנייד שלך • הגדר את מכשיר Verticaplus למצב מופעל. • ודא שמכשיר Verticaplus מחובר לאפליקציה. ראה שימוש באפליקציה במהלך הטיפול במכשיר Verticaplus 	<p>כדי להפעיל הגדרה זו, ורטיקה חייב להיות מחובר</p>
<p>לחץ פעמיים על לחצן האנרגיה כדי לנעול את לחצן האנרגיה.</p>	<p>כדי לנעול את האנרגיה, לחץ דאבל קליק</p>
<p>כדי לנעול את לחצן האנרגיה במצב זה, לחץ על לחצן האנרגיה ברציפות למשך 5 עד 10 שניות ושחרר אותו.</p>	<p>כדי לנעול את האנרגיה, לחץ 5 שניות ברציפות ושחרר</p>

9 פרטיות נתונים

כאשר אפליקציית Verticaplus פעילה, נתוני הטיפול שלך מסונכרנים באופן אוטומטי עם שירותי הענן המשמשים את או-מד מדיקל בע"מ.

מכשיר Verticaplus ואפליקציית Verticaplus משתמשים באלגוריתמים חזקים להצפנה כדי לשלוח ולקבל נתונים בין מכשיר Verticaplus, האפליקציה ושרתי הענן. הנתונים שלך מאוחסנים מוצפנים ואנונימיים. הגישה לנתונים שלך מוגבלת לאנשי צוות מורשים לצורך תמיכת לקוח ומעקב אחר מכשירים בלבד. כדי למחוק את נתוני המשתמש שלך או לעדכן את מספר הטלפון שלך, שלח דוא"ל אל service@vertica-labs.com.

הנתונים מאוחסנים ומשמשים עבור:

- התאמה אישית של הטיפול - האפליקציה משתמשת בנתוני הטיפול כדי לספק משוב מצטבר על איכות הטיפול.
- שמירת היסטוריית טיפולים - האפליקציה שומרת תיעוד של טיפולים קודמים, ומאפשרת למשתמשים לסקור את היסטוריית הטיפולים שלהם ולהעריך שיפורים לאורך זמן.

אפליקציית Verticaplus-1 Verticaplus הינן בתאימות לתקני האבטחה הבאים:

- IEC 62304:2006 + AMDI:2015 CSV - תוכנת מכשור רפואי - תהליכי מחזור חיי תוכנה, מהדורה 1.1
- הנחיות לתוכן של הגשות טרום שיווק עבור תוכנות הכלולות במכשירים רפואיים
- MDCG 2019-16 הדרכה בנושא אבטחת סייבר למכשירים רפואיים
- תוכן הגשות טרום שיווק לניהול אבטחת סייבר במכשור רפואי
- EN ISO 14971:2012 / ISO 14971:2019 יישום ניהול סיכונים
- IEC 62366-1:2015 חלק 1: יישום הנדסת שמישות למכשור רפואי

תמיד היו מוכנים עם Vertica.

יצרן**או-מד מדיקל* בע"מ**

רחוב ציבעונית 1, ת.ד. 89 טבריה 1410002, ישראל

טלפון: +972-4-9036999

דוא"ל: service@vertica-labs.comאתר אינטרנט: www.vertica-labs.com**נציג האיחוד האירופי**

G&D&Y

,Tolstraat 112

אמסטרדם EL 1077

הולנד

זכויות יוצרים © 2024 או-מד מדיקל* בע"מ
Vertica* הינו סימן מסחרי של או-מד מדיקל* בע"מ.
כל הזכויות שמורות. טכנולוגיה מוגנת בפטנט.



תאריך הוצאה: מאי 2024 | OH_Misc0124_RevA

