

מדריך שימוש מקוצר **Verticaplus**

היכון, הכן, צא!

www.vertica-labs.com

מסמך זה מכיל את התרגום להוראות המקוריות בשפה האנגלית

תאי 2024 | OH_Misc0119_RevA



ברכות על מכשיר ה- Verticaplus החדש שלך!
למען בטיחותך והצלחת הטיפולים:

- קרא והבן את הוראות השימוש במלואן לפני השימוש במכשיר Verticaplus. שמור את הוראות השימוש ואת מדריך השימוש המקוצר לעיון עתידי. תמיד תוכל לעיין במדריך השימוש הדיגיטלי באפליקציית Verticaplus לקבלת תמיכה נוספת.
- שים לב במיוחד להוראות, לאזהרות, לאמצעי הזהירות ולהוראות הבטיחות

שלב 1: התקנת אפליקציית Verticaplus

בהתאם למכשיר הטלפון שלך (מערכת ההפעלה Android או iOS), אפליקציית Verticaplus מותקנת מחנות Google Play או מחנות האפליקציות של Apple. ניתן למצוא אותה על ידי חיפוש "Verticaplus".

הסמל נראה כך:



לתשומת ליבך אפליקציית Verticaplus משמשת יחד עם מכשיר Verticaplus. לקבלת הוראות מפורטות לשימוש במכשיר Verticaplus לביצוע טיפול, עיין בהוראות השימוש של Vertica או במדריך השימוש המקוצר (P/N OH_Misc0027_RevA). לקבלת הוראות מפורטות לשימוש באפליקציית Verticaplus, עיין בהוראות השימוש של Verticaplus (P/N Misc0124)



עבור Android

הורד את Verticaplus
ב-Google Play



עבור iOS

הורד את Verticaplus
ב-App Store



למידע נוסף:

הורד הוראות שימוש
Verticaplus



שלב 2: הגדרת האפליקציה

מומלץ מאוד להשתמש באפליקציית Verticaplus עם מכשיר Verticaplus כדי להפיק את מירב היתרונות. האפליקציה מספקת מגוון תכונות ייחודיות ל-Verticaplus, כולל איכות הטיפול ומעקב.



כאשר משתמשים באפליקציה בפעם הראשונה, יש להזין מספר פרטים אישיים כדי להירשם, יש לבחור סיסמה ולמלא שאלון קצר. לאחר השלמת פרטים אלה, האפליקציה מבצעת בדיקה עצמית

חיבור האפליקציה למכשיר Verticaplus.

א. ודא שהבלוטות' במכשיר הנייד מופעל.

ב. הדלק את מכשיר ה-Verticaplus (ראה הוראות שימוש / הגדרת המכשיר למצב מופעל וכבוי). האפליקציה סורקת אוטומטית את מכשיר ה-Verticaplus הקרוב ביותר.

כאשר מכשיר Verticaplus התחבר, תהליך הרישום בוצע בהצלחה. לאחר מכן, מכשיר Verticaplus יתחיל בבדיקת מערכתאוטומטית. המכשיר ירטוט כדי לציין שבדיקת המערכת הושלמה.

הקש על 'הבא'

המסך הראשי נפתח, ומכשיר Verticaplus מוכן עבורך כדי שתוכל ליהנות מהיתרונות של טיפולי Verticaplus מותאמים אישית.

עיין בהוראות השימוש של Verticaplus לקבלת הוראות נוספות.

מדריך שימוש מקוצר של Verticaplus

חיווי מצב טיפול
RING+PAD או RING
פעיל

חיווי אנרגיית גלי רדיו
הצגת העברה של
אנרגיית גלי רדיו

חיווי Vertica
מציין שה-Verticaplus
מחובר לאפליקציה

חיווי טיפול
הצגת מצב טיפול פעיל

חיווי סוללה
הצגת מצב הסוללה

הדרכת שימוש ב-Vertica
מאפשרת צפייה בסרטון גם
בזמן הטיפול

לחצן 'הבא'
מנווט לתוצאות הטיפול

חיווי טיימר טיפול
מציין את משך זמן הטיפול

חיווי רמת אנרגיה
הצגת רמת האנרגיה
(שנקבעה 1 עד 6)

הודעות מערכת
הוראות או משוב לטיפול

חיווי איכות הטיפול
מציין את איכות הטיפול
בהתבסס על פרמטרי
הטיפול

'לחצן 'הבית'
חזרה למסך הראשי

לחצן 'עוד'
מאפשר גישה לתפריט
עם אפשרויות נוספות

'לחצן 'לוח שנה'
פתיחת יומן הטיפולים

'לחצן 'הגדרת'
פתיחת ההגדרות

